

Istruzioni generali


Lucidatura di un abutment in titanio (Raw-Abutment®)

Materiale e utensili necessari

-  Analogo da laboratorio
-  Spazzola per lucidare a specchio (Ø 14 mm, ~15.000 giri al minuto)
-  Pasta di lucidatura (Diamond Polishing Paste, codice articolo ZBAA9821)
-  Disco separatore
-  Gommini diamantati/Frese tungsteno
-  Microscopio
-  Spazzola in fibra di cotone per la lucidatura
-  Prodotto per la lucidatura a specchio*

 *** ATTENZIONE!** Si raccomanda di osservare le indicazioni del produttore. Questa scheda rappresenta una sintesi del processo, è possibile riscontrare delle lievi differenze a seconda del produttore.

Lavorazione dell'abutment in titanio

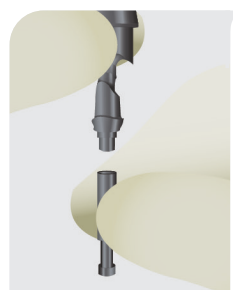


1 Fissare l'abutment sull'analogo da laboratorio

L'analogo da laboratorio protegge la connessione dell'impianto: la connessione non deve essere lucidata! Tenere l'abutment dall'analogo da laboratorio, dal grezzo, utilizzando pinze o similari.




2 Applicare la pasta sulla spazzola per la lucidatura a specchio

Differenziare la lucidatura accertandosi di lucidare a specchio il profilo d'emergenza: una superficie liscia riduce il deposito di batteri. La parte coronale sarà rifinita in base alla tecnica utilizzata.

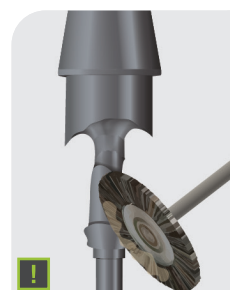

3 Lucidare l'abutment in maniera uniforme

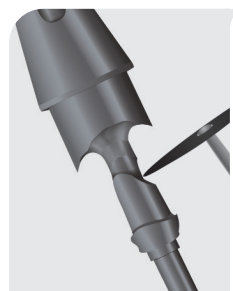

4 Separare gli abutment dal blocco con un disco separatore


Per certi restauri può essere utile separare subito l'abutment dal grezzo.




5 Rifinire la zona di taglio e il lato interno con gommini diamantati/frese tungsteno



6 Lucidare l'abutment in maniera uniforme (opzionale)

 **ATTENZIONE:** le frese e gli strumenti per la lucidatura devono essere privi di leganti chimici che inquinino il metallo.

 *** ATTENZIONE!** Si raccomanda di osservare le indicazioni del produttore. Questa scheda rappresenta una sintesi del processo, è possibile riscontrare delle lievi differenze a seconda del produttore.

Lucidatura degli abutment in titanio al microscopio (opzionale) e finitura



1 Applicare la pasta sulla spazzola per la lucidatura a specchio




2 Lucidare l'abutment in maniera uniforme

Differenziare la lucidatura accertandosi di lucidare a specchio il profilo d'emergenza: una superficie liscia riduce il deposito di batteri. La parte coronale sarà rifinita in base alla tecnica utilizzata.



3 Lucidare con la spazzola e con un prodotto per la lucidatura a specchio*

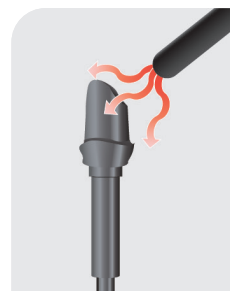

4 Detergere l'abutment con getto di vapore