

Zirkonzahn[®]

Human Zirconium Technology



FRESCO CERAMICS

sulla zirconia Prettau[®] 3 Dispersive[®]

STRUTTURA IN ZIRCONIA PRETTAU® 3 DISPERSIVE® MONOLITICA STRATIFICATA CON FRESCO CERAMICS



La struttura in zirconia policromatica Prettau® 3 Dispersive® è ulteriormente individualizzata mediante colorazione manuale con i Colour Liquids Prettau® 4 Anterior® Aquarell A1 e i colori intensivi Incisal blue e Incisal grey. La fase di colorazione è facoltativa, in quanto la zirconia è già dotata di un gradiente di colore naturale durante la fase di produzione.

Dopo la sinterizzazione, la zona gengivale è stratificata con la ceramica Fresco Gingiva 5 per creare un colore di base ottimale. Sulla zona vestibolare del dente viene invece applicato il prodotto Fresco Enamel Fluo.



Prima della cottura n. 1 dei Fresco, la fluorescenza è controllata sotto la lampada UV. Dopo la cottura, la struttura è caratterizzata con ICE Stains 3D by Enrico Steger; la zona incisale viene ombreggiata con la nuova tonalità Blue Lightning.



NOVITÀ

CONSIGLIO: applica il colore Blue Lightning per un'area incisale davvero naturale



STEP BY STEP



5

Dopo la caratterizzazione

Modellazione con Fresco Enamel e Fresco Gingiva



6

Superficie finale – Prima della cottura n. 2 dei Fresco

Risultato dopo la cottura n. 2 dei Fresco

Specialmente nella zona gengivale, la caratterizzazione con gli stain non è più necessaria: basta infatti la sola pasta ceramica per ottenere una gengiva dall'aspetto totalmente naturale.

Grazie alla loro elevata densità primaria, le ceramiche Fresco presentano una contrazione molto bassa. Per questo motivo, un solo ciclo di cottura (cottura n. 2 dei Fresco) di Fresco Ceramics è sufficiente per finalizzare la forma del dente e della gengiva dopo la cottura n. 1 dei Fresco.



7

Modellazione della superficie del dente (opzionale)



8

Superficie finale dopo la cottura opzionale con stain e glasura

Opzionalmente, è possibile modellare la superficie dei denti con gli strumenti di lavorazione e valorizzare la struttura tramite una cottura rapida di stain e glasura.

NOVITÀ

Set Fresco Essential

OPTIONALE:

Fresco Enamel Transpa Orange e
Fresco Enamel Transpa Grey




Queste pagine sono indirizzate a un pubblico internazionale. Non tutti i prodotti menzionati sono disponibili in tutti i paesi. L'area di applicazione dei prodotti può variare a seconda del paese. Contattare il proprio Team di Vendita per informazioni più dettagliate.



FRESCO CERAMICS

LA NUOVA ARTE DELLA STRATIFICAZIONE

- Paste ceramiche per la stratificazione delle aree gengivali e vestibolari dei denti
- Per strutture in zirconia monolitiche o leggermente ridotte
- Riproduzione naturale della gengiva solamente con Fresco Gingiva; l'applicazione di stain non è necessaria
- Proprietà di modellazione eccellenti grazie alla consistenza pastosa, che può essere personalizzata aggiungendo Fresco Liquid e Fresco Gel
- Bassa contrazione grazie all'alta densità primaria e al controllo efficiente della cottura
- Spettro cromatico: Fresco Gingiva da 1 a 6, Fresco Enamel Fluo, Opal, Transpa 3, Transpa Neutral, Transpa Orange e Transpa Grey

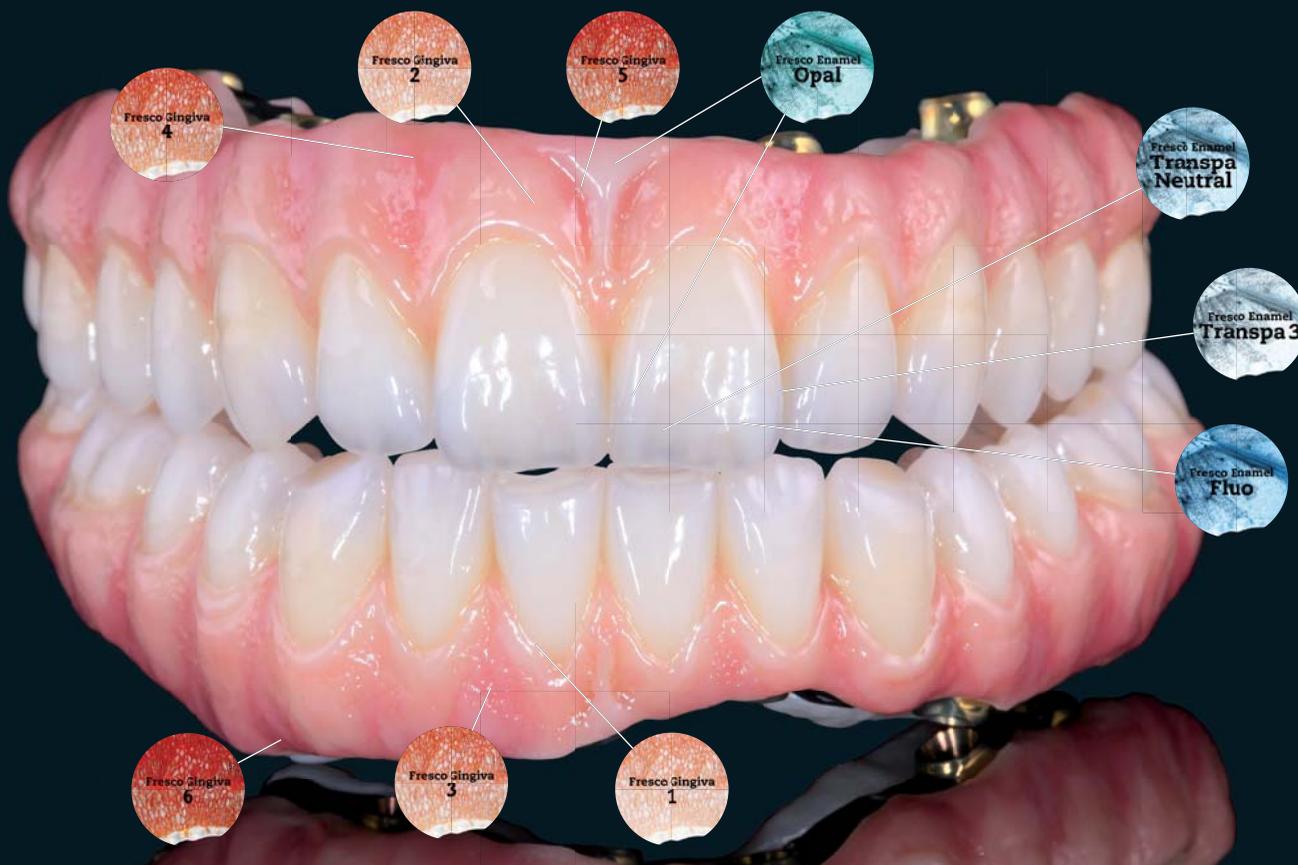

Tutti i dati sono soggetti a modifiche. Salvo errori ed omissioni. Versione: 18/02/2022



WEAB5440IT=