



Dentallabor Steger Julian



Via Giuseppe Verdi 18, 39031 Brunico, Italia



0123 456 789



info@labor-stegerjulian.com



www.labor-stegerjulian.com

Istruzioni generali

Cementazione di un restauro in zirconia (Prettau® Anterior®, Zirconia Prettau®, Anatomic Coloured, ICE Zirkon Traslucente) su basi in titanio

Materiale ed utensili necessari



Sabbia (ossido di alluminio:
dimensioni grana 110 µm;
3,5 bar)



Tamponi



Pennello per
l'applicazione del primer



Getto di vapore



Chiave esagonale



Cemento*



Aria compressa secca e priva
d'olio ISO/DIN 7494-2:2014-03



Materiale facilmente rimovibile
(ad es. cera)



Fotopolimerizzatore



Bonder universale*



Primer universale*



Scaler per la rimozione
del materiale in eccesso



* ATTENZIONE!

Si raccomanda di osservare le indicazioni del produttore! Questa scheda rappresenta una sintesi del processo, è possibile riscontrare delle lievi differenze a seconda del produttore.

NOTA:

Le basi in titanio possono essere cementate in ambiente orale o in laboratorio sul modello. Al fine di evitare contaminazioni con la saliva, cementare preferibilmente in laboratorio.

Trattamento preliminare/Pulizia del restauro in zirconia (Prettau® Anterior®, Zirconia Prettau®, Anatomic Coloured, ICE Zirkon Traslucente)

- 1 Sabbinare con ossido di alluminio (110 µm; 3.5 bar)
- 2 Pulire con getto di vapore
- 3 Asciugare con aria compressa
- 4 Applicare il bonder*
- 5 Rimuovere materiale in eccesso con aria compressa e fare asciugare 60 s

! Per una migliore adesione: Fresare la spirale sul lato interno dell'abutment in zirconia

Trattamento preliminare delle basi in titanio di Zirkonzahn

- 1 Pulire con getto di vapore
- 2 Posizionare le basi in titanio sul modello, asciugare con aria compressa
- 3 Riempire con del materiale facilmente rimovibile
- 4 Applicare il primer universale*
- 5 Asciugare con aria compressa 60 s

! **ATTENZIONE!**
Si raccomanda di osservare le indicazioni del produttore! Questa scheda rappresenta una sintesi del processo, è possibile riscontrare delle lievi differenze a seconda del produttore.

! **Sabbatura Prettau® Anterior® (ingrandimento 5000 x):**

50 µm 110 µm 250 µm

Cementazione della restaurazione

- 1 Applicare il cemento*
- 2 Comprimer bene
- 3 Fotopolimerizzare (2 s.) e rimuovere il materiale in eccesso 2 s
- 4 Fotopolimerizzare (120 s.) da tutti i lati 120 s
- 5 Rimuovere il materiale di riempimento
- 6 Restauro cementato ultimato