

Einfärbung Prettau Zirkon: Frontzähne

Tauchen Sie den metallfreien Pinsel ins Colour Liquid ein.

**WICHTIGER
HINWEIS**

metallfreier Pinsel



SCHRITT 1



SCHRITT 2

7 – 9 x



SCHRITT 3

5 – 7 x



Vor jedem Farbwechsel Pinsel mit Verdüner auswaschen und trocknen! (auf Papierserviette)



SCHRITT 4

2 – 3 x



**ACHTUNG
Farbwechsel**



Vor jedem Farbwechsel Pinsel mit Verdüner auswaschen und trocknen! (auf Papierserviette)



SCHRITT 5

1 – 2 x



Vor jedem Farbwechsel Pinsel mit Verdüner auswaschen und trocknen! (auf Papierserviette)



SCHRITT 6

1 x



Vor jedem Farbwechsel Pinsel mit Verdüner auswaschen und trocknen! (auf Papierserviette)



SCHRITT 7

1 x



SCHRITT 8



7 – 9 x

Vor jedem Farbwechsel
Pinsel mit Verdünner
auswaschen und
trocknen! (auf
Papierserviette)



SCHRITT 9



5 – 7 x



SCHRITT 10

**ACHTUNG
Farbwechsel**



1 – 2 x

Vor jedem Farbwechsel
Pinsel mit Verdünner
auswaschen und
trocknen! (auf
Papierserviette)



SCHRITT 11




1 x

Vor jedem Farbwechsel
Pinsel mit Verdünner
auswaschen und
trocknen! (auf
Papierserviette)



oder

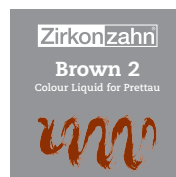

SCHRITT 12



2 – 3 x

Vor jedem Farbwechsel
Pinsel mit Verdünner
auswaschen und
trocknen! (auf
Papierserviette)



SCHRITT 13



Trocknen

SCHRITT 14



Sintern

Einfärbung Prettau Zirkon: Molaren

Tauchen Sie den metallfreien Pinsel ins Colour Liquid ein.

**WICHTIGER
HINWEIS**

metallfreier Pinsel



SCHRITT 1



7 – 9 x

SCHRITT 2



5 – 7 x

SCHRITT 3



2 – 3 x

SCHRITT 4



**ACHTUNG
Farbwechsel**




Vor jedem Farbwechsel
Pinsel mit Verdüner
auswaschen und
trocknen! (auf
Papierserviette)

1 – 2 x

SCHRITT 5



oder

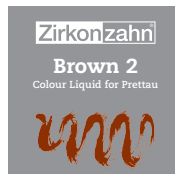

Vor jedem Farbwechsel
Pinsel mit Verdüner
auswaschen und
trocknen! (auf
Papierserviette)

2 – 3 x

SCHRITT 6



Vor jedem Farbwechsel
Pinsel mit Verdüner
auswaschen und
trocknen! (auf
Papierserviette)

1 x

SCHRITT 7

