

Allgemeine Anleitung

Zementieren einer Zirkonrestauration (Veneer) aus Prettau® Zirkon auf natürlichem Zahn

Benötigte Werkzeuge und Materialien



	Sandstrahler (Aluminiumoxid: Korngröße 110 µm; 2,5 bar)		Einweg-Applikator		Werkzeug zur Entfernung von Zementüberschüssen
	Dampfstrahler		Ätzel*		Polymerisationslampe
	Trockene ölfreie Druckluft ISO/DIN 7494-2:2014-03		Ethanol* (ohne Parabene und unparfümiert)		Glycerin/Airblock*
	Bonder*		Adhäsivzement*		

! * ACHTUNG! Bitte die jeweiligen Anweisungen des Produktherstellers beachten! Abweichungen aufgrund vereinfachter Prozessdarstellung möglich.


1. Vorbereitung/Reinigung der Restauration aus Prettau® Zirkon



2. Zementierung der Krone

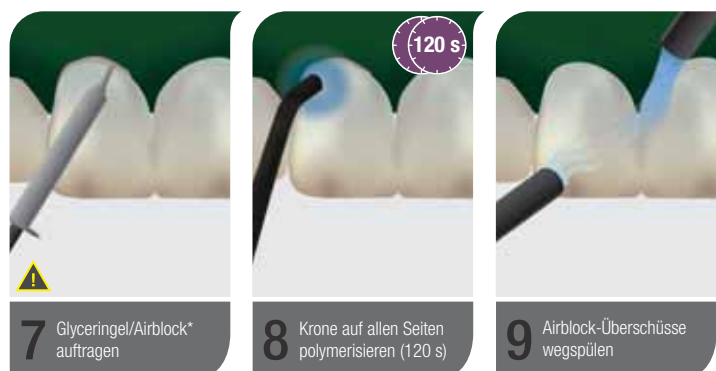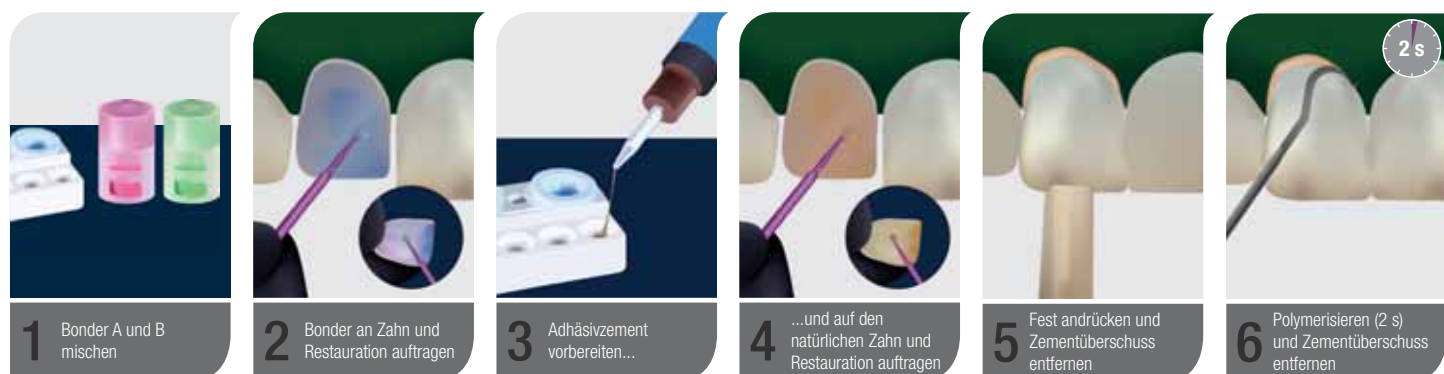

! Sandstrahlung Prettau® 4 Anterior® bei 5000-facher Vergrößerung:

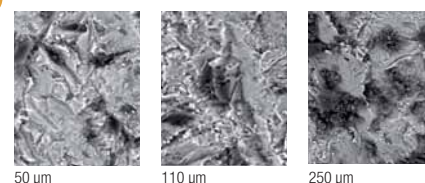

! Empfehlung zur Vorbereitung des Zahnes:
Den Zahn reinigen und Plaque entfernen. Schleimhäute schützen.

! * ACHTUNG!
Bitte die jeweiligen Anweisungen des Produktherstellers beachten!
Abweichungen aufgrund vereinfachter Prozessdarstellung möglich.