

Istruzioni d'uso


Colorazione della zirconia con i Colour Liquid Prettau® Aquarell




Effetto del lavoro colorato prima della sinterizzazione

I 16 colori della serie Colour Liquid Prettau® Aquarell coprono l'intero spettro cromatico della "scala vita", sono a base di acqua e privi di acidi. Questi nuovi colori sono inoltre dotati di speciali pigmenti bio calcinabili che permettono un facile orientamento nella scelta della tonalità più adatta, e rendono visibile ogni singola pennellata che può essere controllata prima del processo di sinterizzazione. La colorazione personalizzata dei particolari, p.es. dei mamelloni, delle aree cervicali e interdentali, può così essere notevolmente accentuata ed eseguita con estrema precisione.

Durante la sinterizzazione i pigmenti bio calcinabili al 100% bruciano completamente e ne consegue un restauro perfettamente rifinito e nel colore dentale desiderato. L'applicazione delle tonalità specifiche per le aree cervicali ed i colori intensi conferiscono, infine, al lavoro un maggiore pregio estetico. Per i nuovi colori acquerello della serie Prettau® è stata messa a punto anche una tecnica di pennellatura facilmente eseguibile per colorare la zirconia Prettau® grezza senza l'impiego di acidi.

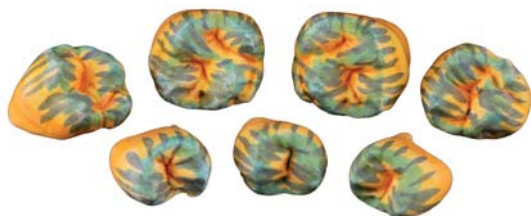

Effetto della colorazione finita prima della sinterizzazione

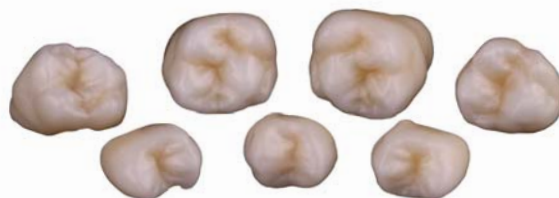

Risultato del lavoro dopo la sinterizzazione



Colour Liquid Prettau® Aquarell



Pennello senza parti in metallo per l'applicazione dei liquidi coloranti



Salvietta di carta per asciugare il pennello



Lampada infrarossa



Forno per sinterizzazione

Indicazioni per la conservazione e l'applicazione

Conservare i Colour Liquid Prettau® Aquarell in un luogo fresco e buio. Per ottenere un colore omogeneo, agitare bene i flaconi prima dell'uso. Immergere completamente il pennello nel colore ed eliminare il prodotto in eccesso passando il pennello sul bordo del flacone, prima di colorare i pezzi grezzi. In caso di cambio del pennello, lavarlo bene in abbondante acqua.



Istruzioni per la colorazione di un dente del settore anteriore

Situazione di partenza: dente fresato



Fase	Colour Liquid	Applicazione	area labiale	area palatale
1	A3 Prettau® Aquarell Colour Liquid	1x 2x 3x		
2	A3 Prettau® Aquarell Colour Liquid	1x 2x		
3	A3 Prettau® Aquarell Colour Liquid	1x		
4	Cervical A Aquarell Colour Liquid for Prettau®	1x		
5	Incisal blue Aquarell Colour Liquid for Prettau®	1x - 2x		
6	Incisal grey Aquarell Colour Liquid for Prettau®	1x		
7	Incisal violet Aquarell Colour Liquid for Prettau®	1x		
8	Orange 1 Aquarell Colour Liquid for Prettau®	1x		
	Brown 2 Aquarell Colour Liquid for Prettau®	1x		

Asciugatura: dopo avere colorato il manufatto, posizionarlo sul supporto in refrattario e metterlo sotto la lampada infrarossa, con la superficie oclusale rivolta verso il basso e lasciare asciugare per 20 – 40 minuti a seconda delle dimensioni del pezzo. **NB:** l'eventuale superamento di questi tempi non altera comunque i colori.

Istruzioni per la colorazione di un dente del settore posteriore

Situazione di partenza: dente fresato



Fase	Colour Liquid	Applicazione	area buccale	area oclusale
1	A3 Prettau® Aquarell Colour Liquid	1x 2x 3x		
2	A3 Prettau® Aquarell Colour Liquid	1x 2x		
3	A3 Prettau® Aquarell Colour Liquid	1x		
4	Cervical A Aquarell Colour Liquid for Prettau®	1x 2x 3x area bucc. area occl.		
5	Incisal blue Aquarell Colour Liquid for Prettau®	1x - 2x		
6	Incisal grey Aquarell Colour Liquid for Prettau®	1x		
7	Incisal violet Aquarell Colour Liquid for Prettau®	1x		
8	Orange 1 Aquarell Colour Liquid for Prettau®	1x		
	Brown 2 Aquarell Colour Liquid for Prettau®	1x		

Asciugatura: dopo avere colorato il manufatto, posizionarlo sul supporto in refrattario e metterlo sotto la lampada infrarossa, con la superficie oclusale rivolta verso il basso e lasciare asciugare per 20 – 40 minuti a seconda delle dimensioni del pezzo. **NB:** l'eventuale superamento di questi tempi non altera comunque i colori.

Serie completa dei colori Colour Liquid Prettau® Aquarell



Colour Liquid Prettau® Aquarell A1-D4

A base di acqua con pigmenti bio, per la colorazione a pennello della Zirconia Prettau® grezza

Disponibili in flaconi da 20 ml o 50 ml in set o singolarmente



Colour Liquid Prettau® Aquarell Cervical A-D

A base di acqua con pigmenti bio e privi di acidi, per la colorazione dell'area interdentale, dell'area cervicale e dei solchi occlusali

Disponibili in flaconi da 20 ml; ideali per Zirconia Prettau®



Colour Liquid Prettau® Aquarell Intensiv

ideali per Zirconia Prettau®

Disponibili in flaconi da 20 ml, in set o singolarmente

- **Colour Liquid Prettau® Aquarell Tissue A:** a base di acqua con pigmenti bio e privi di acidi; per la colorazione dell'area gengivale (rosa chiaro)
- **Colour Liquid Prettau® Aquarell Tissue B:** a base di acqua con pigmenti bio e privi di acidi; per la colorazione dell'area gengivale (rosa)
- **Colour Liquid Prettau® Aquarell Tissue C:** a base di acqua con pigmenti bio e privi di acidi; per la colorazione dell'area gengivale (rosa-violetto)
- **Colour Liquid Prettau® Aquarell Incisal blue:** a base di acqua con pigmenti bio e privi di acidi; per la colorazione dell'area incisale e per dare un effetto di profondità (bocca di pesce)
- **Colour Liquid Prettau® Aquarell Incisal grey:** a base di acqua con pigmenti bio e privi di acidi; per la colorazione delle zone trasparenti, al fine di abbassare i livelli di grigio
- **Colour Liquid Prettau® Aquarell Incisal violet:** a base di acqua con pigmenti bio e privi di acidi; per la colorazione delle aree incisali
- **Colour Liquid Prettau® Aquarell Orange 1:** a base di acqua con pigmenti bio e privi di acidi; per la colorazione dei solchi occlusali
- **Colour Liquid Prettau® Aquarell Brown 2:** a base di acqua con pigmenti bio e privi di acidi; per la colorazione dei solchi occlusali



Colour Liquid Aquarell Bio-Pigment

Disponibili in flaconi da 10 ml, in set o singolarmente

- **Colour Liquid Aquarell Bio-Pigment A1-D4:** pigmenti colorati per vivacizzare i Colour Liquid Prettau® Aquarell A1-D4
- **Colour Liquid Aquarell Bio-Pigment Tissue:** pigmenti colorati per vivacizzare i Colour Prettau® Aquarell Tissue A-C
- **Colour Liquid Aquarell Bio-Pigment Orange:** pigmenti colorati per vivacizzare i Colour Liquid Prettau® Aquarell Orange 1 e i Colour Liquid Prettau® Aquarell Cervical A-D
- **Colour Liquid Aquarell Bio-Pigment Brown:** pigmenti colorati per vivacizzare i Colour Liquid Prettau® Aquarell Brown 2
- **Colour Liquid Aquarell Bio-Pigment Grey:** pigmenti colorati per vivacizzare i Colour Liquid Prettau® Aquarell Incisal grey
- **Colour Liquid Aquarell Bio-Pigment Violet:** pigmenti colorati per vivacizzare i Colour Liquid Prettau® Aquarell Incisal violet
- **Colour Liquid Aquarell Bio-Pigment Blue:** pigmenti colorati per vivacizzare i Colour Liquid Prettau® Aquarell Incisal violet



Colour Liquid Waterbased Diluente

A base di acqua, per diluire e schiarire tutti i Colour Liquid Waterbased, i Colour Liquid Prettau® Aquarell, i colori per l'area cervicale e i colori intensi della serie Prettau® Aquarell

Flacone da 100 ml



Colour Liquid Waterbased Stabilizzatore

Stabilizzatore a base di acqua, per rendere omogenei tutti i Colour Liquid Waterbased, i Colour Liquid Prettau® Aquarell, i colori per l'area cervicale, i colori intensi della serie Prettau® Aquarell e per correggere eventuali risultati cromatici (aggiungere un 5% di prodotto)

Flacone da 100 ml