

Istruzioni d'uso

Colour Liquid Aquarell Bio-Pigment



I Colour Liquid Aquarell Bio-Pigment aggiunti ai Colour Liquid Prettau® Aquarell migliorano l'intensità cromatica del colore. Si consiglia di riporli in luoghi bui e di evitare l'esposizione diretta ai raggi solari in quanto la loro consistenza cromatica potrebbe variare. L'intensità del colore può essere ravvivata con l'aggiunta di Colour Liquid Aquarell Bio-Pigment. Più Colour Liquid Aquarell Bio-Pigment si usa più si aumenta l'intensità del colore.

Classificazione del colore:

Colour Liquid Prettau® Aquarell	A1 – D4	Cervical A-D	Incisal Blue	Incisal Grey	Incisal Violet	Orange 1	Brown 2	Tissue A-C
Colour Liquid Aquarell Bio-Pigment	A1 – D4	Orange	Blue	Grey	Violet	Orange	Brown	Tissue

1 SITUAZIONE INIZIALE



Il Colour Liquid Aquarell Bio-Pigment calcinabile si utilizza per ravvivare i Colour Liquid Prettau® Aquarell. È indispensabile usare lo stesso tono di colore di Colour Liquid Prettau® Aquarell!

2 PREPARAZIONE DEL COLOUR LIQUID BIO-PIGMENT



Agitare bene il flacone prima dell'uso.

3 APERTURA



Apertura della bottiglietta.

4 QUANTITÀ DI COLOUR LIQUID BIO PIGMENT



1-2 gocce di pigmenti bio per centimetro cubo (oppure ml) di liquido presente nella bottiglietta.

5 MESCOLARE



Chiudere la bottiglietta e agitare molto bene fino a raggiungere una colorazione omogenea.

6 COLORAZIONE



Il Colour Liquid Prettau® Aquarell è ora pronto per la colorazione del manufatto!



DRAA1271=