

Zirkonzahn[®]

Human Zirconium Technology



100% PRETTAU[®] ZIRKON - MADE BY CAD/CAM


„Mit Fleiß zur Perfektion“ Enrico Steger

Hybridlösung im Fall von starken Divergenzen bei Implantaten – okklusal verschraubte Prettau Brücke

Der hier beschriebene Fall weist eine sehr geringe vertikale Dimension auf und zeigt starke Divergenzen der Implantate im Frontzahnbereich. Diese sind zu divergierend, um sie okklusal verschraubt zu realisieren.

Die Restauration soll in Zirkon realisiert werden. Wir entschieden uns für Prettau Zirkon und eine Hybridlösung: posterior okklusal verschraubt und anterior blind auf den Implantaten aufliegend.

Prettau Zirkon ist das Mittel der Wahl, weil es nicht verblendet werden muss. Es wird eine erste Wachsaufstellung gemacht. Diese wird dann im Munde der Patientin anprobiert, um Okklusion, Länge und Ästhetik zu prüfen. Die Wachseinprobe wird in ein Langzeitprovisorium übertragen und im Mund einprobiert. Ist die Patientin zufrieden und sind Funktion und Phonetik optimal eingestellt, erfolgt die Übertragung des Kunststoffprovisoriums in Zirkon. Diese Zirkonarbeit wird mit speziellen Colour Liquids eingefärbt und gesintert. Die Restauration wird im Zahnfleischbereich rosafarben verblendet, anschließend folgt der Malfarbenbrand und die Glasur.

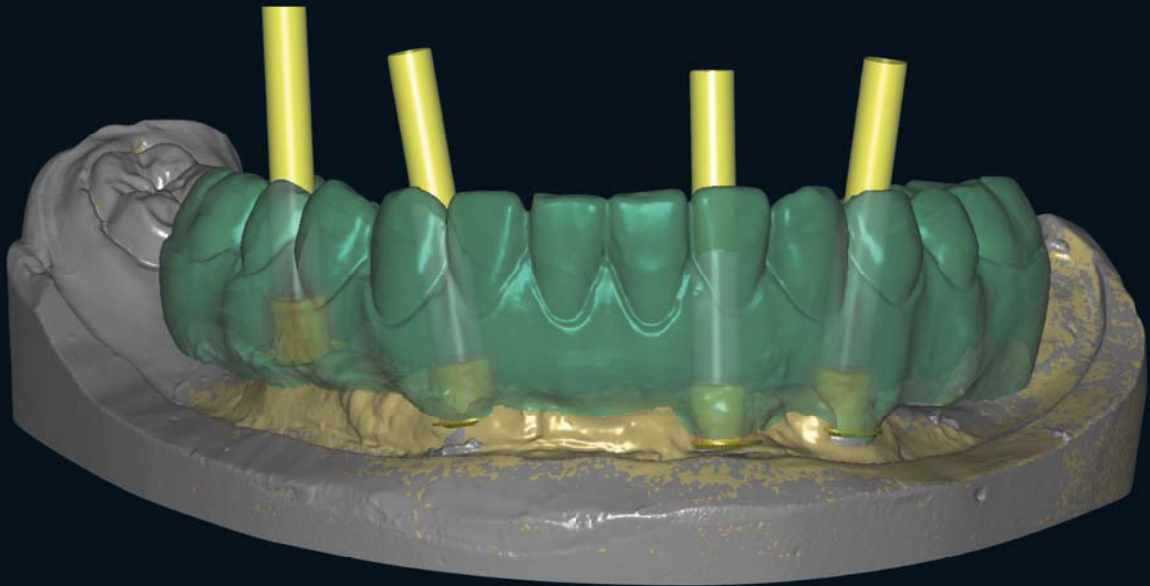

Die Prettau® Bridge

Dr. Bátorfi Béla, Bátorfi Fogászat – DentAvantgArt, Ungarn

Georg Walcher – Zirkonzahn Education Center



Zirkonzahn®



HUMAN ZIRCONIUM TECHNOLOGY

ZIRKONZAHN Worldwide - Tel +39 0474 066 680 - info@zirkonzahn.com - www.zirkonzahn.com



WEAA5334#

Gefräst mit dem CAD/CAM System 5-TEC