

Zirkonzahn®

Human Zirconium Technology






FRIKTIVE TELESKOPARBEIT

Die Zirkonzahn Kultur

COCRONIT SUPERIOR BRÜCKE AUF TELESKOPEN MIT ZÄHNEN AUS ABRO® BASIC MULTISTRATUM®

- Verfügbare Daten:* Fotos, analoge und digitalisierte Meistermodelle, analoges und digitalisiertes getragenes Provisorium
- Ausgangssituation:* Stark dezimierter Restzahnbestand
- Geplante Versorgung:* Abnehmbare teleskopierende Brücke aus Cocronit Superior* mit einer Tertiärstruktur aus dem Kunststoff Abro® Basic Multistratum®
- Realisierung:*
- Virtuelle Zahnaufstellung in der Software Zirkonzahn.Modifier und Individualisierung der Zahnformen aus der virtuellen Zahnbibliothek Heroes Collection
 - Digitale Modellation der Teleskope aus Cocronit Superior in der Software Zirkonzahn.Modellier und anschließendes Fräsen im Fräsgerät M2 Dual Teleskoper; Parallelisierung der Teleskope im Parallelometer
 - Digitale Modellation und Fräsen der Sekundärstruktur
 - Prüfen der Friktion der teleskopierenden Strukturen
 - Digitale Modellation der Tertiärstruktur und positionieren der Struktur im Kunststoffblank Abro® Basic Multistratum® in der Software Zirkonzahn.Nesting; anschließendes Fräsen im Fräsgerät M2 Dual Teleskoper
 - Auftragen von Metal Opaquer auf die Sekundärstruktur zur Reduktion des Grauwertes
 - Verklebung der Tertiärstruktur mit der Sekundärstruktur und Adaption der Gingivaanteile sowie Finalisierung der Gingiva mit Gingiva-Composites
 - Finale Eingliederung der Versorgung im Patientenmund

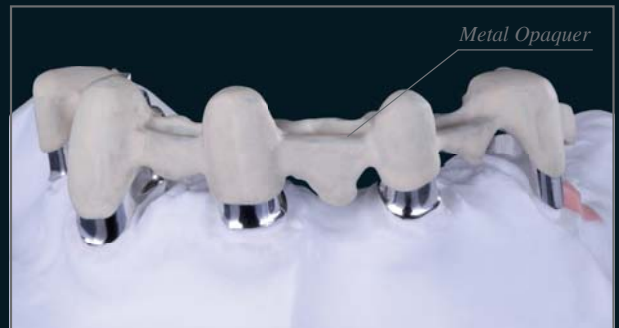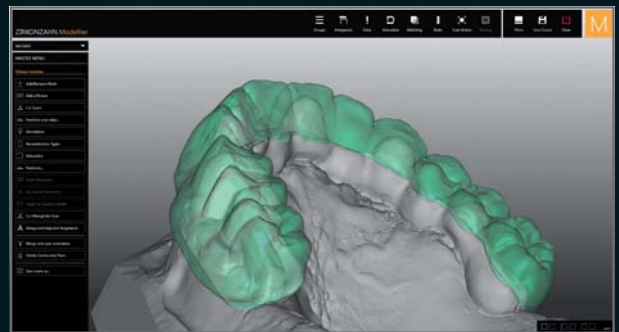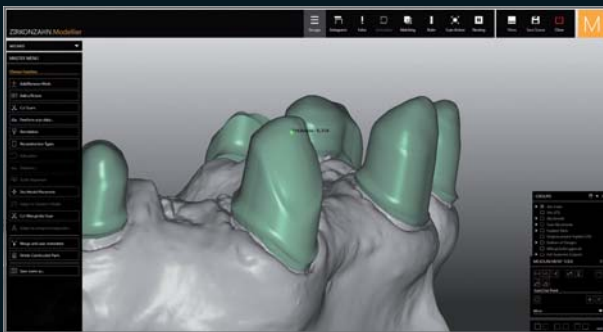

100 % PRÄZISION UND FUNKTION

Dr. Manrique Fonseca

ZTM Alexander Bassermann

ZT Jürgen Feierabend – Zirkonzahn Education Center Bruneck, Südtirol, Italien





NEU! ABRO® BASIC MULTISTRATUM®

- PMMA-basierter Kunststoff mit natürlichem Farbverlauf vom Dentin bis zum Schmelz
- Verbesserte Materialeigenschaften hinsichtlich seiner sehr guten Transluzenzwerte, seiner hohen Biegefestigkeit, Bruchstabilität und Abrasionsbeständigkeit
- Speziell entwickelt zur Herstellung von Prothesenzähnen, eignet sich aber auch zur Fertigung von Langzeitprovisorien sowie Sekundär- und Tertiärstrukturen
- Erhältlich in Dentinfarben; individuelle Gestaltung des Gingivaanteils mit Gingiva-Composites




HUMAN ZIRCONIUM TECHNOLOGY

Zirkonzahn Worldwide – Tel +39 0474 066 680 – info@zirkonzahn.com – www.zirkonzahn.com

NEU! 1 ORBIT – 4 DURCHMESSER 125, 106, 98 UND 95 mm

FRÄSGERÄT-KOMFORTLINIE M2 MIT EXTRAGROSSEM WECHSELORBIT
TELESKOPER. VOLLAUTOMATISCH, FLEXIBEL, VIBRATIONSFREI

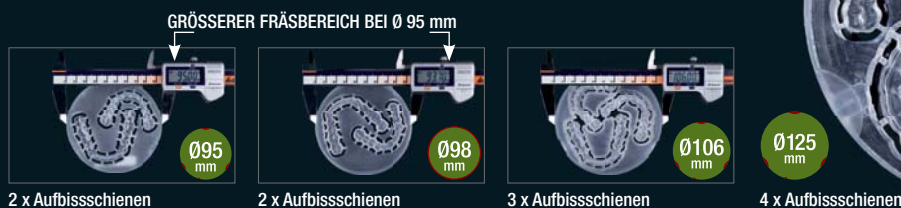

FRÄSGERÄT-
KOMFORTLINIE
M2



WEAB2686DE=

Dieses Dokument ist für ein internationales Publikum bestimmt. Nicht alle der genannten Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Der Anwendungsbereich des Produkts kann je nach Land variieren. Bitte wenden Sie sich an Ihr Verkaufsteam, um nähere Informationen zu erhalten. Alle Angaben ohne Gewähr und vorbehaltlich Änderungen. Version: 05.05.2022