

Zirkonzahn[®]

Human Zirconium Technology




PRETTAU[®] SKIN[®]

DIE ZIRKONZAHN KULTUR

PRETTAU® SKIN® – MINIMALINVASIVE VERSORGUNG MIT HAUCHDÜNNEN ZIRKONVENEERS

Geplante Versorgung: Monolithische Veneers (Prettau® Skin®), Teilkronen sowie eine dreigliedrige Brücke aus Prettau® 2 Dispersive® Zirkon

- Realisierung:*
- Zahnfarbbestimmung mit Zirkonzahn Shade Guide in Prettau® 2 Dispersive®
 - Virtuelle Modellartikulation nach Plaster
 - Virtuelle Zahnaufstellung in der Software Zirkonzahn.Modifier und Individualisierung der Zahnform AIDA aus der virtuellen Zahnbibliothek Heroes Collection
 - Wählen der optimalen Einschubrichtung zur Herstellung eines Block-Out Modells für die fräsbaren Mock-ups für den Ober- und Unterkiefer
 - Nesten der Mock-ups im Kunststoffblank Temp Premium Flexible und anschließendes Fräsen; Einprobe im Patientenmund
 - Digitale Anpassung der ersten Zahnaufstellung und Erstellung der Prep-Guide-Schienen. Diese sind ein Vorschlag des Technikers an den Behandler, an welchen Stellen die Zähne minimalinvasiv präpariert werden sollten, um funktionelle und ästhetische Vorstellungen des Technikers in das finale Ergebnis miteinfließen zu lassen.
 - Minimalinvasive Präparation der natürlichen Zähne
 - Design und Fräsen der hauchdünnen Veneers (0,2 mm), der Teilkronen und der dreigliedrigen Brücke aus Prettau® 2 Dispersive® Zirkon
 - Dichtsintern und anschließende Charakterisierung mit ICE Stains 3D by Enrico Steger
 - Adhäsive Befestigung der finalen Versorgung im Patientenmund

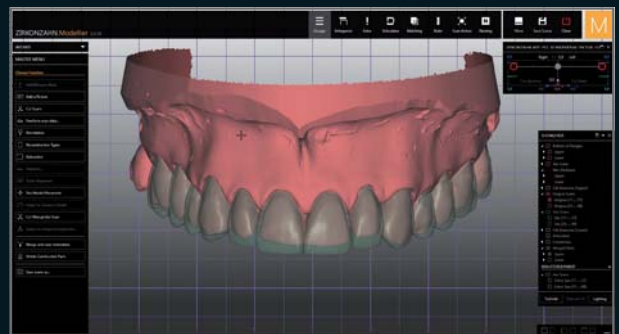

100 % DIGITAL ERSTELLT, MONOLITHISCH GESTALTET

Dr. Francisco García Torres – Mexiko

ZT Alexander Lichtmannegger – Zirkonzahn Education Center Bruneck, Südtirol, Italien



NEU! PRETTAU® SKIN®

Mit der neuen Technik zur Erstellung hauchdünner Prettau® Veneers kann Patienten ein gesundes Lächeln geschenkt werden, ohne oder nur unter minimaler Präparation der Zahnschicht. Die neue Technik eignet sich für die ästhetische Korrektur von Zahnverfärbungen, Zahnlücken, schiefen Zähnen, Zapfenzähnen sowie abradieren Gebissen.





NEU! PRETTAU® 2 DISPERSIVE®

- Mit natürlichem Farbverlauf voreingefärbtes Zirkon mit besonders hoher Transluzenz und außerordentlicher Biegefestigkeit
- Keine Limitationen! Besonders geeignet für monolithische zirkuläre Brücken, aber auch für Einzelkronen, Inlays, Onlays, Veneers, Stege und mehrgliedrige Brücken verwendbar (reduziert oder monolithisch)
- Kein Keramikchipping (durch monolithische Gestaltung), keine Abrasion gegenüber dem Antagonisten
- Auf Wunsch patientenindividuell charakterisierbar mit Colour Liquid Prettau® Aquarell Intensivfarben, Keramik ICE Ceramics, Fresco Ceramics sowie Malfarben ICE Stains 3D by Enrico Steger





HUMAN ZIRCONIUM TECHNOLOGY

Zirkonzahn Worldwide – Tel +39 0474 066 680 – info@zirkonzahn.com – www.zirkonzahn.com

NEU! 1 ORBIT – 4 DURCHMESSER 125, 106, 98 UND 95 mm

FRÄSGERÄT-KOMFORTLINIE M2 MIT EXTRAGROSSEM WECHSELORBIT
TELESKOPER. VOLLAUTOMATISCH, FLEXIBEL, VIBRATIONSFREI

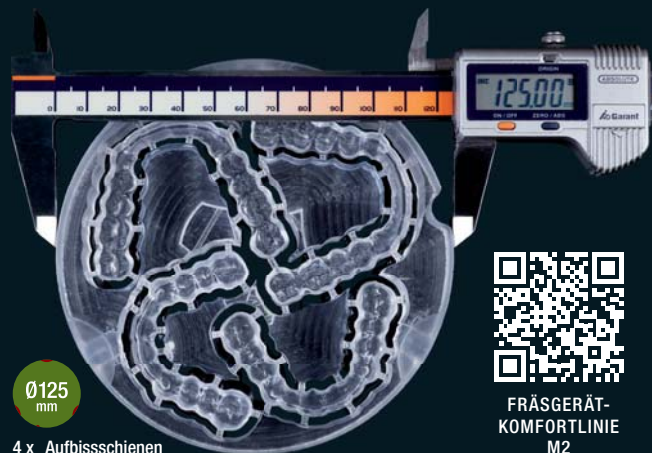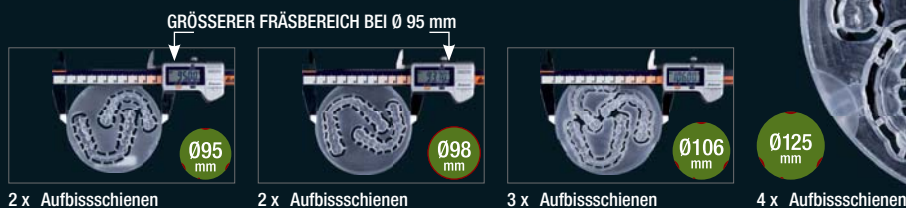

FRÄSGERÄT-
KOMFORTLINIE
M2



WEAB2689DE=