

**Zirkonzahn<sup>®</sup>**

*Human Zirconium Technology*



**FRESCO CERAMICS**

*Die Zirkonzahn Kultur*

## FRESCO GINGIVA UND FRESCO ENAMEL

Mit den neuen, speziell für ihren Anwendungsbereich entwickelten Keramikpasten können monolithische sowie leicht reduzierte Zirkonstruktoren im Zahnfleischbereich mit Fresco Gingiva und im vestibulären Zahnbereich mit Fresco Enamel schnell und einfach verblendet werden. Speziell im Bereich der Gingiva muss das Zirkongerüst nicht mit Mal Farben grundiert werden, sondern die natürliche Zahnfleischnachbildung kann rein durch das Auftragen der Keramikpasten erzielt werden.

Im Vergleich zu herkömmlichen Keramiken bleiben die Fresco-Pasten sehr lange feucht und können mehrere Stunden modelliert werden. Die Konsistenz kann durch die Zugabe der zwei Anmischflüssigkeiten Fresco Liquid und Fresco Gel je nach bevorzugter Arbeitsweise weiter individualisiert werden. Aufgrund der hohen Primärdichte haben die Pasten eine sehr geringe Schrumpfung, weshalb nach dem Frescobrand 1 meist schon ein Brennvorgang (Frescobrand 2) vollkommen ausreichend ist, um die Zahnform und die Gingiva fertigzustellen.

Mit dieser Brandführung können Zirkonstruktoren unterschiedlicher Größe zeitgleich gebrannt werden. Es müssen demnach keine Parameter wie Haltezeit und/oder Temperatur verändert werden, sondern nur Parameter wie Aufheiz- und Abkühlrate, da diese Werte im direkten Bezug zu der Größe und der Masse der zu verblendenden Zirkonstruktoren stehen.

Sollte ein Korrekturbrand durchgeführt werden müssen, kann dieser mit gleichen Parametern vollzogen werden. Dies bedeutet gleichbleibende Brandergebnisse mit einer sehr simplen, aber effizienten Brandführung.



MEHR  
INFORMATIONEN



# 100% LEIDENSCHAFT

ZT Alexander Lichtmanegger – Zirkonzahn Education Center Bruneck, Südtirol, Italien



*Double Screw Metal Technik*



## FRESCO CERAMICS

### DIE KUNST DES SCHICHTENS NEU ENTDECKT

- *Keramikpasten zum Verblenden des Gingivabereichs und des vestibulären Zahnbereichs*
- *Für leicht reduzierte sowie monolithische Zirkonstrukturen*
- *Natürliche Zahnfleischnachbildung rein durch das Auftragen von Fresco Gingiva; keine Grundierung mit Malffarben nötig*
- *Hohe Modellierbarkeit durch pastöse Konsistenz, welche durch die Zugabe von Fresco Liquid und Fresco Gel weiter individualisiert werden kann*
- *Geringe Schrumpfung aufgrund hoher Primärdichte und einer effizienten Brandführung*
- *Farbspektrum: Fresco Gingiva 1 bis 6 sowie Fresco Enamel Fluo, Opal, Transpa 3, Transpa Neutral, Transpa Orange und Transpa Gresy*



## HUMAN ZIRCONIUM TECHNOLOGY

Zirkonzahn Worldwide – Tel +39 0474 066 680 – info@zirkonzahn.com – www.zirkonzahn.com

### SET FRESCO ESSENTIAL

NEU

#### OPTIONAL:

*Fresco Enamel Transpa Orange und  
Fresco Enamel Transpa Grey*



WEAB5378DE=

*Dieses Dokument ist für ein internationales Publikum bestimmt. Nicht alle der genannten Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Der Anwendungsbereich des Produkts kann je nach Land variieren. Bitte wenden Sie sich an Ihr Verkaufsteam, um nähere Informationen zu erhalten. Alle Angaben ohne Gewähr und vorbehaltlich Änderungen. Version: 20.01.2022*