


Zirkonzahn[®]

Human Zirconium Technology

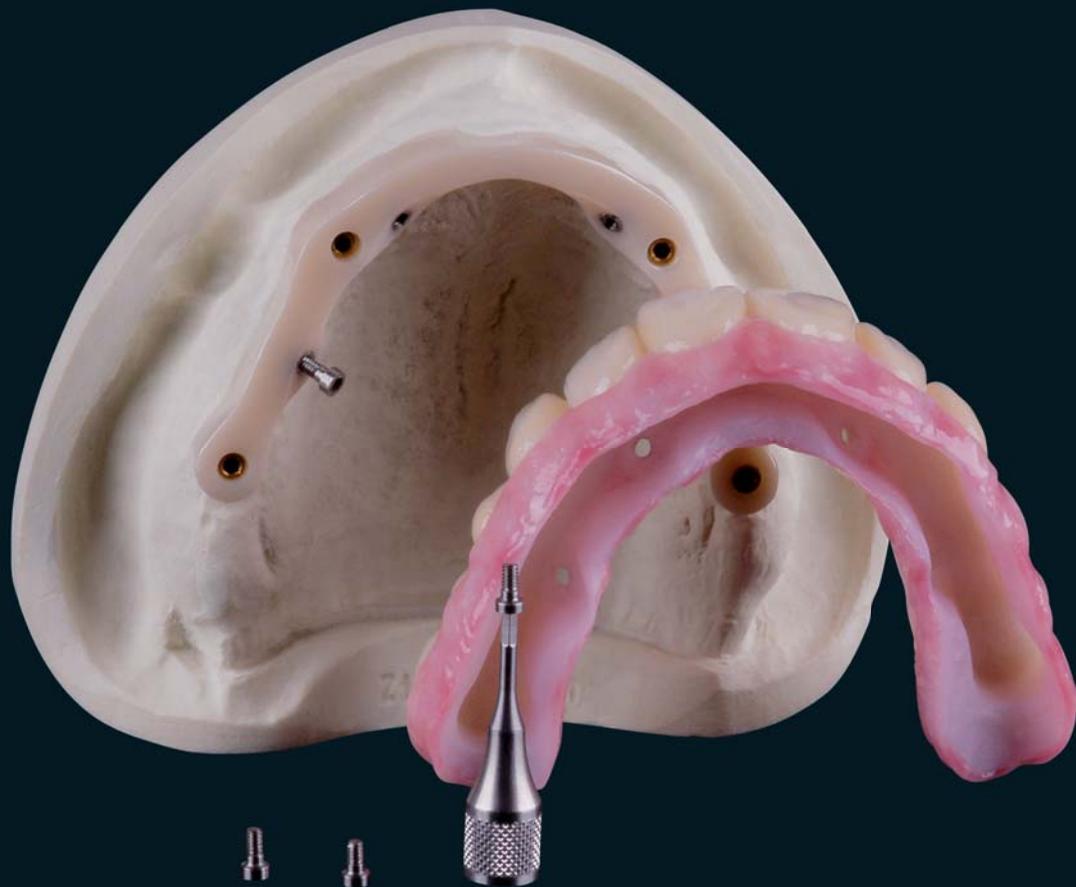

100% ZIRCONIA PRETTAU

Prettau Bridge

Había que elaborar una construcción de barra con una prótesis removible sobre los cuatro implantes de la zona de los dientes posteriores.

Primero se elaboró un pilar de barra circular, que se fijó mediante cuatro tornillos. La construcción de barra se fresó en zirconia, se perfeccionó en el paralelómetro con una fresa de diamante de 1° y se abrigantó. Además, se incorporaron cuatro tornillos en la barra para fijar la construcción secundaria si necesario. Las construcciones primaria y secundaria están elaboradas en 100% zirconia, con lo cual se consigue una fricción sorprendentemente buena.

El trabajo se colocó sin atornillado secundario. Éste está previsto únicamente en caso de que la fricción se disminuya:



Prettau Bridge

Dr. Rogelio Espinosa, Zirkonzahn México




Zirkonzahn®



HUMAN ZIRCONIUM TECHNOLOGY

*ZIRKONZAHN World Wide - José Luis Ayuso - C/Isaac Albéniz, 1 - 08210 Barberà del Vallès - Barcelona
Teléfono: +34 937 290390 - Fax: +34 937 290450 - Email: iberica@zirkonzahn.com - www.zirkonzahn.com*

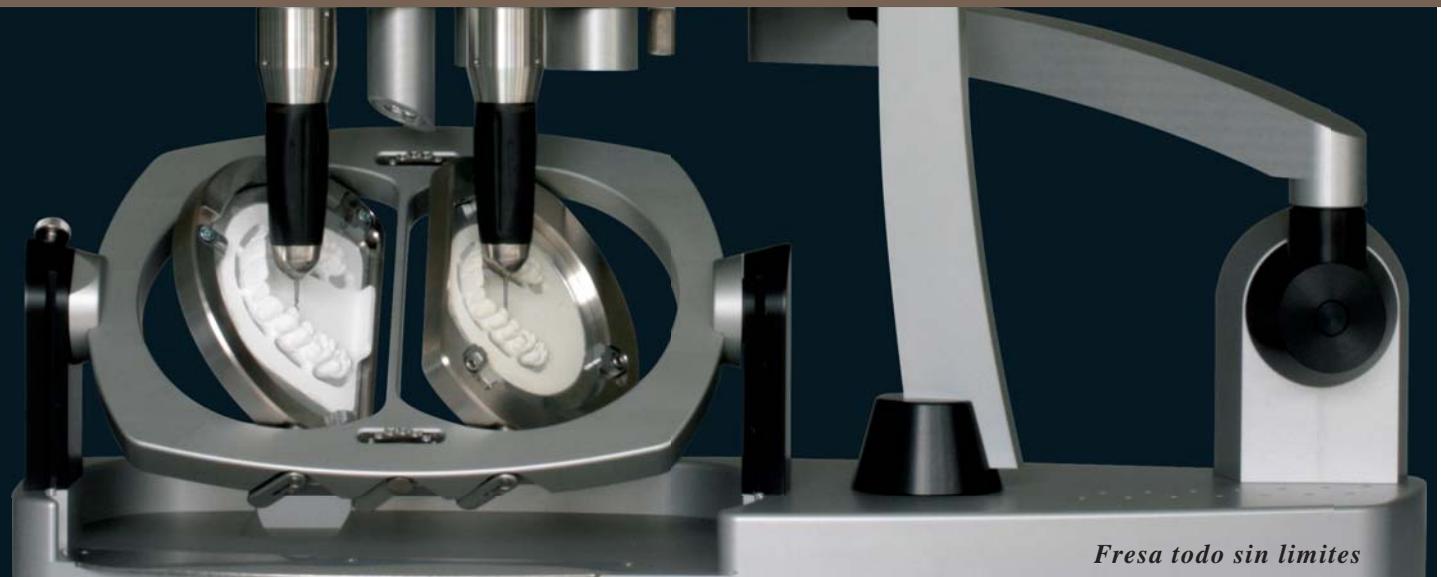

Fresa todo sin limites