


Zirkonzahn®

Human Zirconium Technology

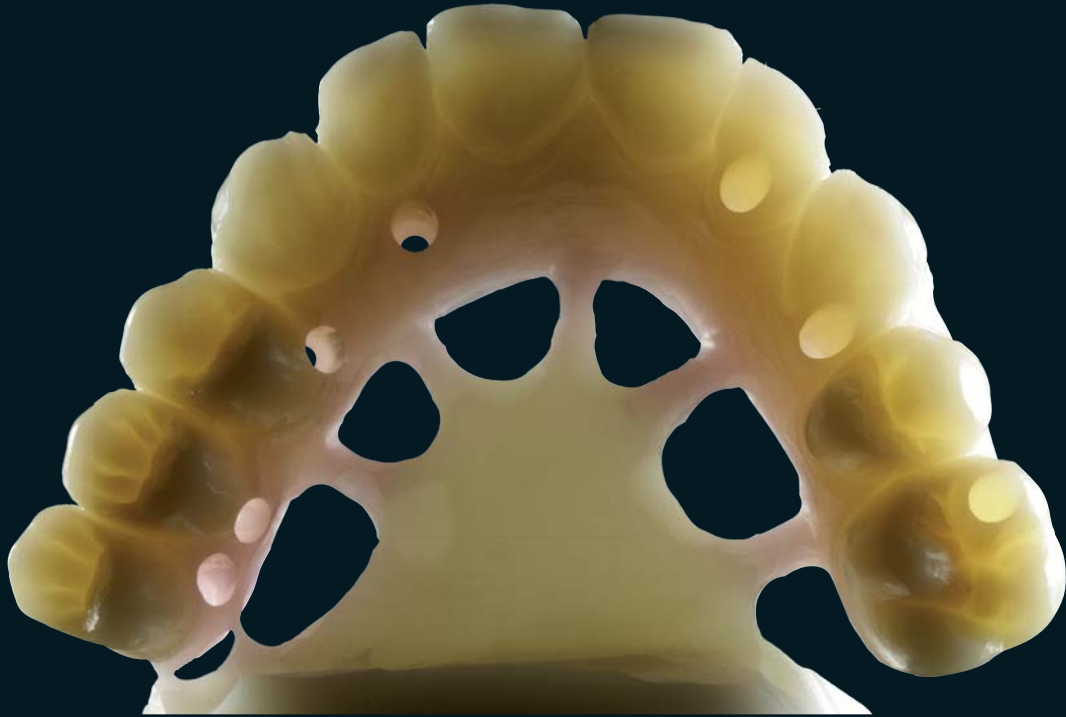

100% ZIRCONIA PRETTAU

„La zirconia necesita héroes“ Enrico Steger

Zirconia Prettau - dos puentes de 100% zirconia

La técnica de coloración es decisiva para lograr un efecto cromático tridimensional y un resultado idéntico al diente natural. Mediante la técnica de coloración Prettau, se colorearon primero los dientes y después la encía. En la región de los dientes anteriores se utilizaron los colores Incisal grey, Incisal violet y Fluoreszenz de la serie Colour Liquid Intensiv for Prettau. Antes de estratificar la cerámica, se aplicó una capa fina de dentina sobre la estructura. Para obtener un aspecto natural de la encía, se debe utilizar un espectro de colores lo más amplio y variado posible en la estratificación. A continuación, la cara labial de los dientes anteriores se cubrió apenas con una fina capa de esmalte. Ésto debe realizarse al mismo tiempo como la estratificación de la encía. Al final, se le da el último toque natural al trabajo acabado mediante un pulido manual.



Prettau Bridge

Jürgen Auffarth (Austria)

En colaboración con el protésico dental Christian Hannker de Dentallabor Bellmann & Hannker (Alemania)




Zirkonzahn®



HUMAN ZIRCONIUM TECHNOLOGY

*ZIRKONZAHN World Wide - José Luis Ayuso - C/Isaac Albéniz, 1 - 08210 Barberà del Vallès - Barcelona
Teléfono: +34 937 290390 - Fax: +34 937 290450 - Email: iberica@zirkonzahn.com - www.zirkonzahn.com*

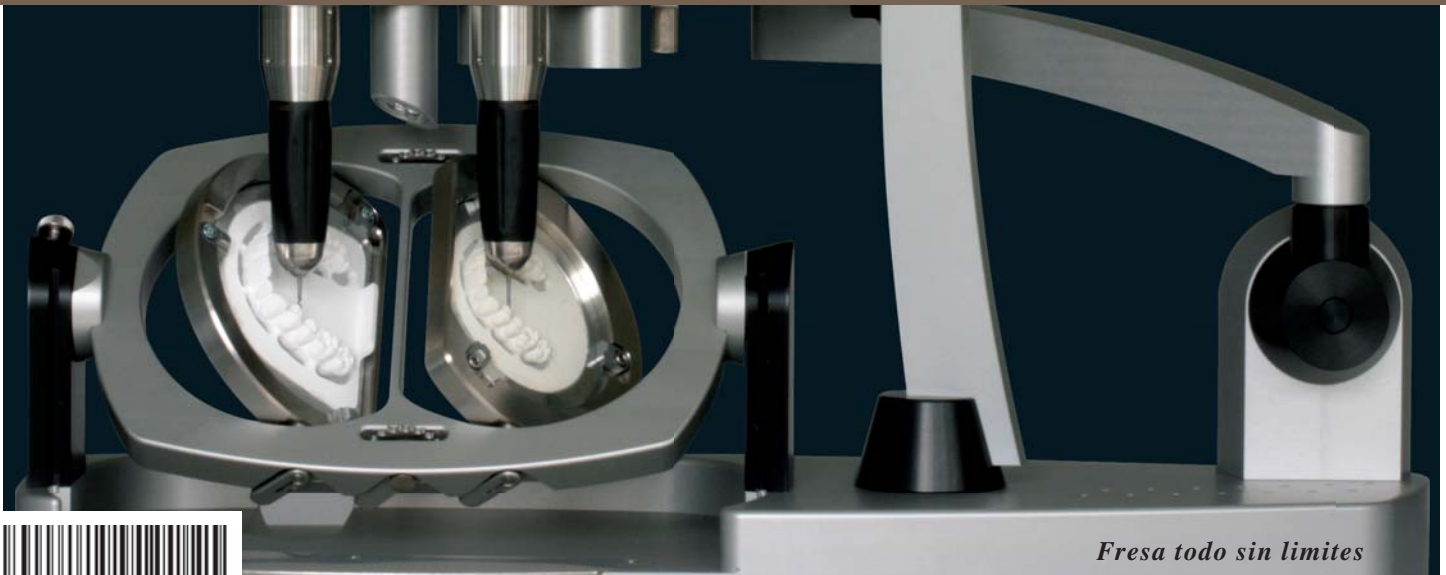

Fresa todo sin limites



WEAA5615=