

Zirkonzahn[®]

Human Zirconium Technology




100% ZIRCONIA PRETTAU[®] - MADE BY CAD/CAM

“La zirconia necesita héroes” Enrico Steger

Puente Prettau® atornillado con base de titanio

En el presente caso, el paciente necesita un puente atornillado oclusalmente (Prettau® Bridge) en el maxilar inferior, con base de titanio sobre 4 implantes (abutments angulados a 20°).

En primer lugar, se realiza el encerado diagnóstico, luego se efectúa el escaneo con la función wax-up del software de Zirkonzahn. A continuación, se realiza la modelación, el anidamiento y el fresado de la zirconia cruda con el Sistema CAD/CAM 5-TEC. Después del fresado, coloreado y sinterizado, se aplica la técnica de estratificación sobre el cut-back, a los 6 dientes del sector anterior. El trabajo se controla sobre el modelo y las carillas 33 – 23 y la encía se revisten con Cerámica ICE Zirkon. Luego se hace el maquillaje y el glaseado del trabajo. Por último, se pasa al cementado de las bases de titanio en la boca del paciente, lo cual garantiza la máxima precisión y pasividad en el posicionamiento sobre los implantes.

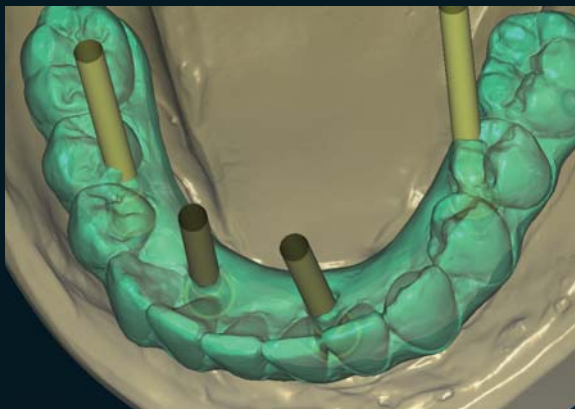

El Prettau® Bridge

Dr. Bryan Limmer – Universidad de Carolina del Norte

Georg Walcher – Zirkonzahn Education Center




Zirkonzahn®



Fresado con el sistema CAD/CAM 5-TEC de Zirkonzahn

HUMAN ZIRCONIUM TECHNOLOGY

ZIRKONZAHN Worldwide - José Luis Ayuso - C/Isaac Albéniz, 1 - 08210 Barberà del Vallès - Barcelona
Teléfono: +34 937 290390 - Fax: +34 937 290450 - Email: iberica@zirkonzahn.com - www.zirkonzahn.com

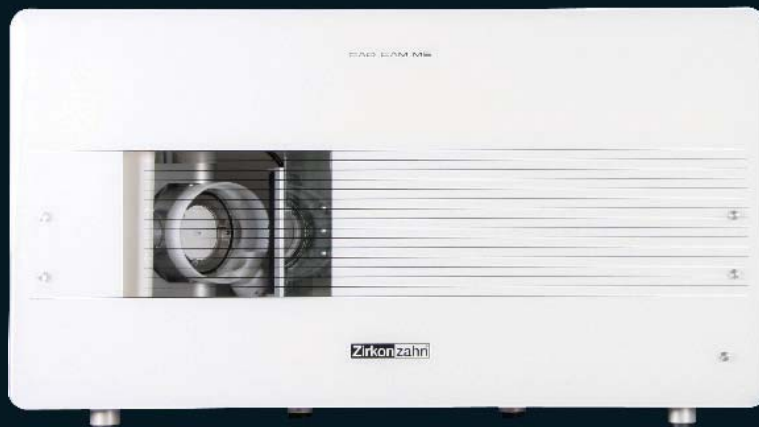

WEAA5638=

Todas las informaciones son sujetas a cambios. Salvo error u omisión. Versión: 06.09.2012