

Zirkonzahn®

Human Zirconium Technology





PRETTAU® 2 DISPERSIVE®

La Cultura Zirkonzahn

RESTAURACIONES DE PRETTAU® 2 DISPERSIVE® SOBRE BARRAS DE TITANIO Y 4 IMPLANTES

- Situación inicial:* Extracción de la dentición comprometida en un paciente de mediana edad
- Solicitud del paciente:* Una sonrisa joven con dientes sanos y brillantes
- Datos disponibles:* Fotos en 2D y escaneos de las prótesis removibles provisionales que usa el paciente
- Restauración prevista:* Dos arcadas completas de zirconia Prettau® 2 Dispersive® con gingiva, cada una soportada por una barra de titanio anodizado, sobre cuatro implantes
- Fases de elaboración:*
- Wax-up utilizando los escaneos de las prótesis removibles provisionales y las bibliotecas de anatomías dentales y gingivales del software Zirkonzahn.Modifier
 - Importación del wax-up en el Zirkonzahn.Modellier; adaptación de las ocho conexiones directas del implante para la producción de un prototipo en resina Prime
 - Verificación de la estética y la función; escaneo del prototipo
 - Modelado individual de las dos barras, fresado y posterior digitalización
 - En el Zirkonzahn.Modellier, afinar los parámetros para un ajuste perfecto; realizar un cutback virtual en la zona vestibular de los dientes anteriores
 - Fresado de las estructuras de zirconia Prettau® 2 Dispersive® AI; acabado a mano
 - Infiltración con Colour Liquids y aplicación de Colour Liquid Prettau® Aquarell Opaque en las paredes del alojamiento de la barra para aumentar el nivel de opacidad y evitar que las barras se transparenten a través de la zirconia. Sinterización
 - Ligera estratificación en las zonas gingivales y áreas no funcionales con ICE Ceramics
 - Anodizado de las barras en color dorado y cementación en las sobre estructuras

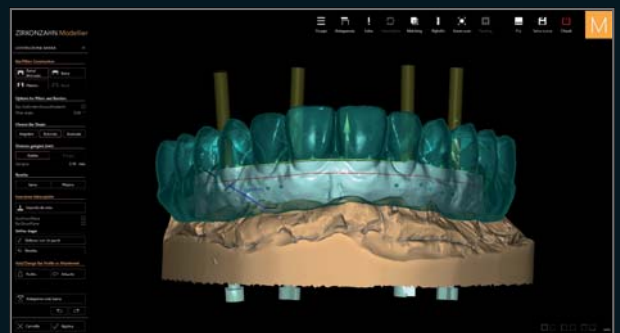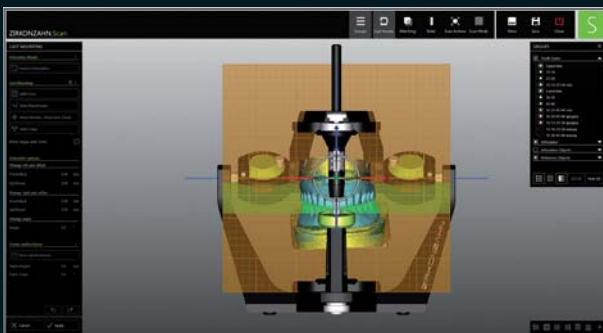

100% ESTÉTICA

*TPD. Federico Presicci – Laboratorio dental Antonio Lazetera, Savona, Italia
Dr. Massimo Callerio – Cassolnovo, Milán, Italia*



Resultado: Una restauración con un aspecto fresco y juvenil, que cumple plenamente con el deseo del paciente





¡NUEVO! PRETTAU® 2 DISPERSIVE®

- Zirconia policromática altamente translúcida, con colores naturales esfumados y una elevada resistencia a la flexión
- ¡Sin límites! Especialmente indicada para arcadas completas monolíticas, así como coronas individuales, inlays, onlays, veneers, barras y puentes de varias unidades (completamente monolíticas o reducidas)
- No se producen fracturas (chipping), debido al diseño monolítico. No provoca abrasión al antagonista
- Permite la caracterización individual de la restauración con Colour Liquid Prettau® Aquarell Intensivos, ICE Ceramics, Fresco Ceramics y ICE Stains 3D by Enrico Steger




HUMAN ZIRCONIUM TECHNOLOGY

Zirkonzahn Worldwide – Tel +39 0474 066 680 – info@zirkonzahn.com – www.zirkonzahn.com

Si desea conocer a nuestros afiliados comerciales en su propio país, consulte nuestra página web

¡NUEVO! 1 ÓRBITA – 4 DIÁMETROS 125, 106, 98 Y 95 mm

LÍNEA DE FRESADORAS CONFORT M2 CON TELESKOPER ORBIT EXTRA GRANDE. TOTALMENTE AUTOMÁTICA, FLEXIBLE Y LIBRE DE VIBRACIONES

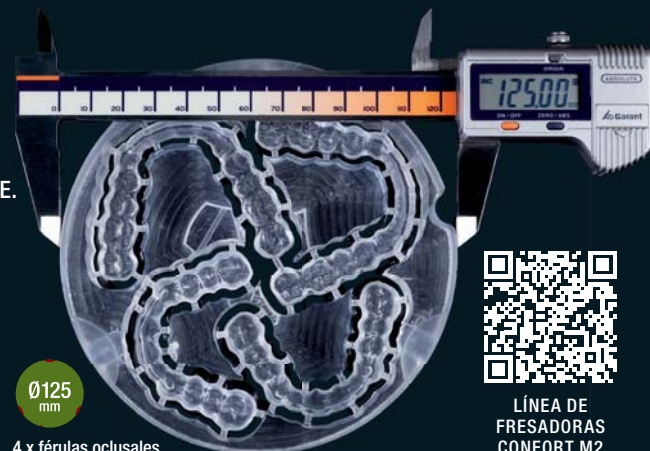

2 x férulas oclusales.

2 x férulas oclusales.

3 x férulas oclusales.

4 x férulas oclusales.

LÍNEA DE FRESADORAS CONFORT M2



WEAB2685ES=