

Zirkonzahn[®]

Human Zirconium Technology



FRESCO CERAMICS

La Cultura Zirkonzahn

FRESCO GINGIVA Y FRESCO ENAMEL

Con las nuevas pastas cerámicas Fresco Gingiva y Fresco Enamel se pueden estratificar rápida y fácilmente estructuras monolíticas así como estructuras ligeramente reducidas en la zona gingival y vestibular.

La caracterización con Stains ya no es necesaria, especialmente en la zona gingival, ya que se puede conseguir la reproducción de la encía natural aplicando las pastas cerámicas.

En comparación con la cerámica convencional, la cerámica Fresco permanece húmeda durante mucho más tiempo y puede modelarse durante varias horas. La consistencia de la cerámica puede personalizarse aún más, añadiendo los dos líquidos de mezcla Fresco Liquid y Fresco Gel, según el método de trabajo preferido. Debido a la alta densidad primaria, la cerámica tiene una contracción muy baja. Esto significa que, un ciclo de cocción del Fresco es suficiente para terminar la forma del diente y la encía, después de la primera cocción. Con este método de cocción se pueden procesar simultáneamente estructuras de zirconia de diferentes tamaños. Por lo tanto, no es necesario modificar parámetros como el tiempo de mantenimiento y/o la temperatura: los parámetros de calentamiento y enfriamiento son, de hecho, los únicos que deben ajustarse, ya que estos valores están directamente relacionados con el tamaño y la masa de la estructura de zirconia.

Si hay que realizar una cocción de corrección, se pueden utilizar los mismos parámetros. Esto garantiza resultados excelentes con un ciclo de cocción muy sencillo pero eficaz.



MÁS INFORMACIÓN




100% PASIÓN

TPD Alexander Lichtmannegger – Zirkonzahn Education Center Brunico, Sudirol, Italia



Técnica „Double Screw Metal“

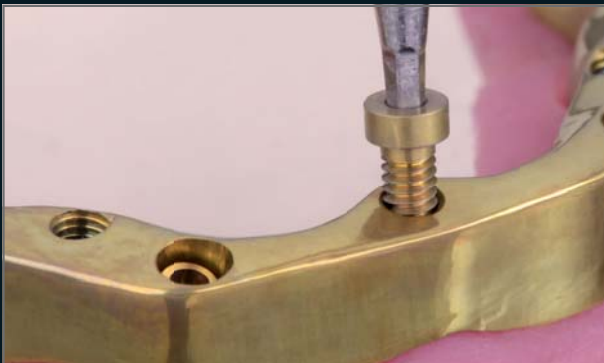

FRESCO CERAMICS

EL NUEVO ARTE DE LA ESTRATIFICACIÓN

- Pasta cerámica para la estratificación rápida y fácil de la zona vestibular (Fresco Enamel) y la zona gingival (Fresco Gingiva)
- Indicada para estructuras en zirconia tanto monolíticas como estructuras ligeramente reducidas
- Garantizada reproducción gingival natural con Fresco Gingiva, no es necesaria la caracterización con Stains
- Excelentes propiedades de modelado gracias a su consistencia pastosa que puede personalizarse agregando Fresco Gel e Fresco Liquid según el método preferido de trabajo
- Mínima contracción gracias a la alta densidad primaria y al eficiente proceso de cocción
- Gama de colores: Fresco Gingiva 1 a 6, así como Fresco Enamel Fluo, Opal, Transpa 3, Transpa Neutral, Transpa Orange y Transpa Grey



HUMAN ZIRCONIUM TECHNOLOGY

Zirkonzahn Worldwide – Tel +39 0474 066 680 – info@zirkonzahn.com – www.zirkonzahn.com

Si desea conocer a nuestros afiliados comerciales en su propio país, consulte nuestra página web

NUEVO

SET FRESCO ESSENTIAL

OPCIONAL:

Fresco Enamel Transpa Orange y
Fresco Enamel Transpa Grey



WEAB5378ES=