


Zirkonzahn[®]

Human Zirconium Technology

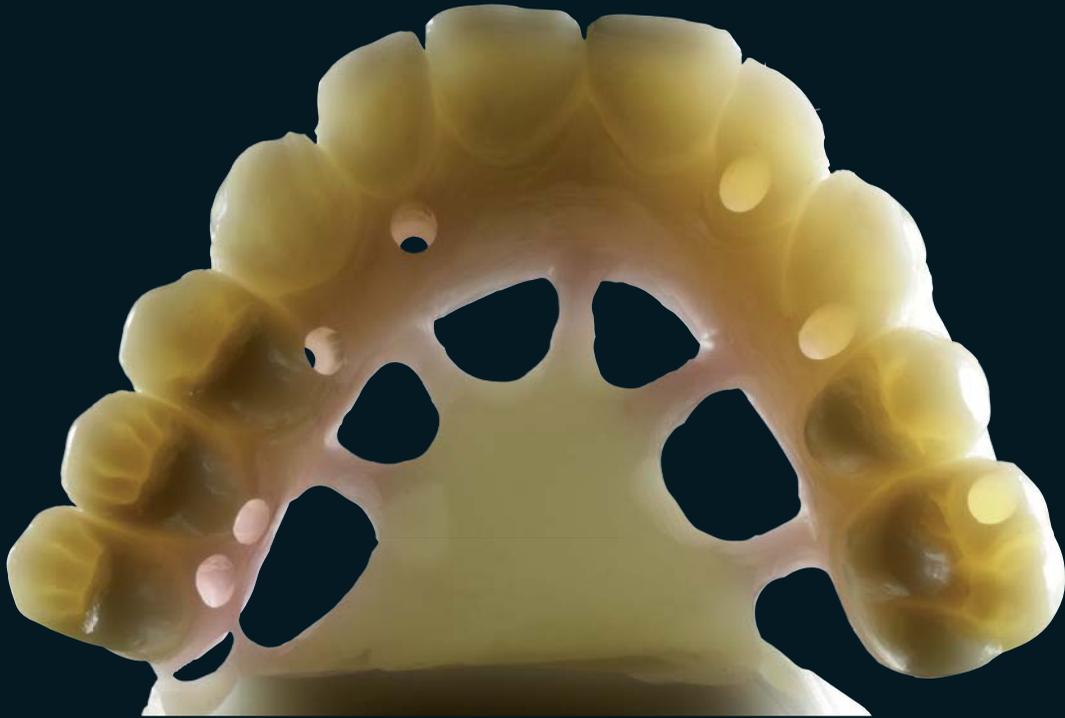

100 % ZIRCONONE « PRETTAU »

Deux bridges tout zircone « Prettau »

La coloration est d'une importance capitale pour un rendu chromatique satisfaisant dans les trois dimensions, condition indispensable pour un aspect naturel de la restauration terminée.

La technique de coloration Prettau a été utilisée d'abord pour les dents, puis pour les parties gingivales. Pour le secteur antérieur nous nous sommes servi des colorants Prettau intensifs : « Incisal grey (gris) » et « Incisal violet », ainsi que du colorant « Colour Liquid Fluorescence ». Avant de stratifier la céramique cosmétique sur l'armature, une fine couche de dentine a été appliquée sur celle-ci. Pour que les parties gingivales aient vraiment un aspect naturel, il est important de les réaliser en utilisant une palette de nuances de teinte la plus diversifiée possible. Nous avons appliqué sur les faces vestibulaires simplement une fine couche d'émail. Il est recommandé de stratifier les parties gingivales en même temps que la zone vestibulaire. La touche finale est apportée par le polissage manuel, lequel confère à la restauration un aspect encore plus naturel.



Bridge de Prettau

Jürgen Auffarth (Autriche)

Travail réalisé en collaboration avec le prothésiste maître artisan Christian Hannker,

Laboratoire : Bellmann & Hannker (Allemagne)



Zirkonzahn®




HUMAN ZIRCONIUM TECHNOLOGY

ZIRKONZAHN World Wide - Tel +39 0474 066 680 - info@zirkonzahn.com - www.zirkonzahn.com

ZIRCONLAB - Yves PROBST - Tel +33 388 69 55 44 - zirconlab@wanadoo.fr - www.zirconlab.com

LABORATOIRE FOUQUIER - Tel +33 492537156 - rvf.lab@wanadoo.fr - www.richard-fouquier.com

ROTEC - Tel +33 240 62 11 02 - Fax +33 240 24 72 15 - contact@rotec.fr - www.rotec.fr

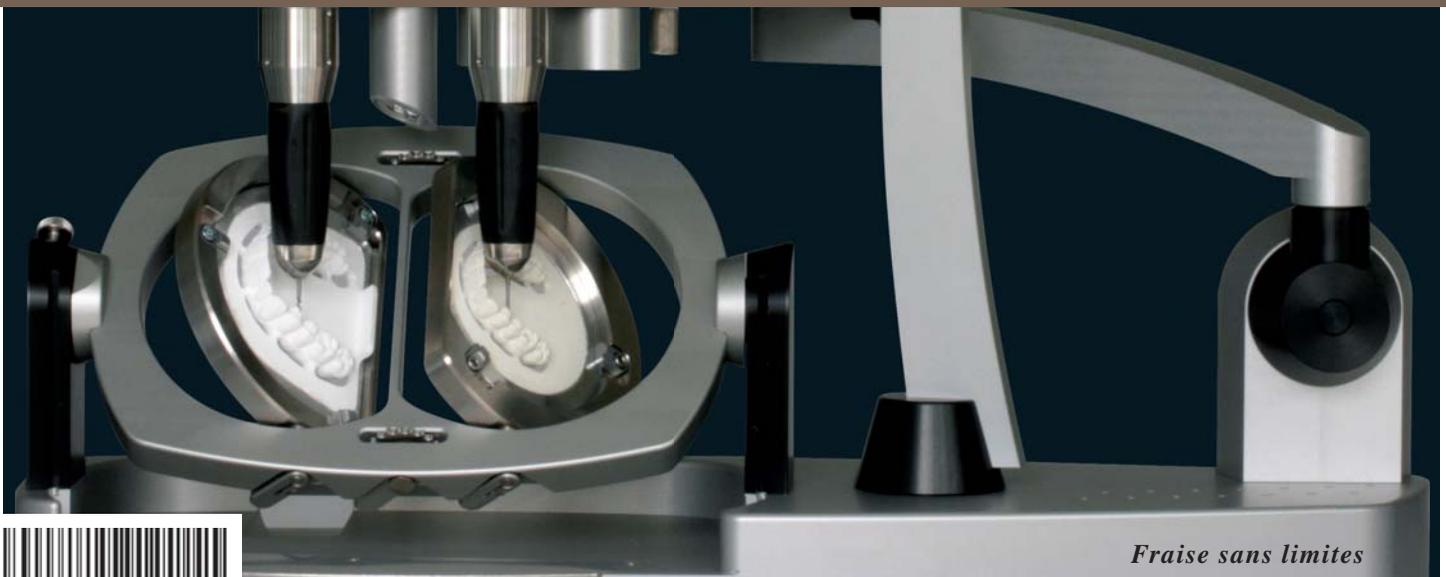

Fraise sans limites



WEAAS715=