

Zirkonzahn®

Human Zirconium Technology



PRETTAU® 2 DISPERSIVE® BLEACH

La Culture Zirkonzahn



RESTAURATIONS MONOLITHIQUES EN ZIRCON PRETTAU® 2 DISPERSIVE® BLEACH

**SUR DES BASES EN TITANE ANODISÉES, STRATIFIÉES UNIQUEMENT DANS LES ZONES GINGIVALES
AVEC FRESCO CERAMICS**

Les deux restaurations monolithiques ont été planifiées sur la base de la numérisation de deux modèles fraisés avec une gencive amovible. Le premier montage virtuel a été effectué dans le logiciel Zirkonzahn.Modifier, en individualisant les anatomies dentaires naturelles de la bibliothèque virtuelle Heroes Collection. Grâce aux repères virtuels dont sont pourvues les dents de la Heroes Collection, la gencive a pu être générée automatiquement dans le logiciel.

Les structures ont ensuite été produites avec la fraiseuse M2 Dual Teleskoper dans un bloc de zircone Prettau® 2 Dispersive® de la tonalité Bleach 0M1. Cette zircone, qui montre une très haute transparence et résistance à la flexion, est caractérisée déjà pendant le processus de fabrication avec un gradient de couleur naturel. Cependant, pour un résultat plus personnalisé, la couleur a été accentuée individuellement au moyen des liquides de coloration intensifs Colour Liquids Prettau® Aquarell, et, après le frittage, la zone gingivale a été recouverte avec les pâtes céramiques Fresco Gingiva.

Pour finir, avant le collage les bases en titane ont été anodisées en couleur or avec le Titanium spectral-colouring Anodizer, afin de les masquer sous les structures en zircone et de réduire ainsi la valeur de gris de la restauration finale en zircone.

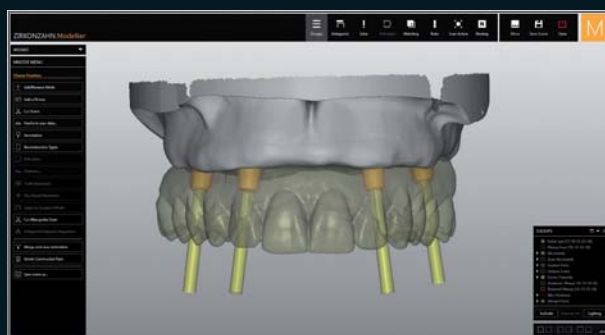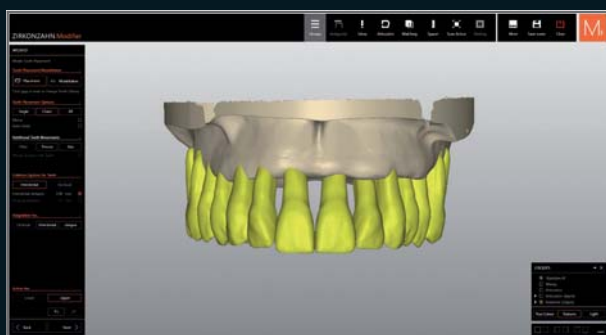

100 % DESIGN MONOLITHIQUE, STRATIFICATION SEULEMENT DANS LA PARTIE GINGIVALE

Proth. Dent. Janka Gregorics, Zirkozahn Education Center Brunico, Tyrol du Sud, Italie





PRETTAU® 2 DISPERSIVE®

- Zircone précolorée avec nuances de couleurs naturelles, une excellente résistance à la flexion et une translucidité particulièrement élevée
- Aucune limite ! Particulièrement adaptée pour les arcades complètes monolithiques, mais aussi pour les couronnes unitaires, les inlays, les onlays, les facettes, les barres et les bridges à plusieurs éléments (structures réduites ou monolithiques)
- Pas d'écaillage de la céramique (grâce à la conception monolithique) ; pas d'abrasion de l'antagoniste
- Caractérisation individuelle de la restauration avec les Colour Liquids Prettau® Aquarell Intensifs, ICE Ceramics, Fresco Ceramics et les teintes maquillantes ICE 3D Stains by Enrico Steger
- Également disponible dans trois teintes Bleach



Tonalités Bleach



Prettau® 2 Dispersive® Bleach 0M1

HUMAN ZIRCONIUM TECHNOLOGY

Rotec – Tél +33 240 62 11 02 – Fax +33 240 24 72 15 – contact@rotec.fr – www.rotec-fr.com

Zirkonzahn Worldwide – Tel +39 0474 066 680 – info@zirkonzahn.com – www.zirkonzahn.com

NOUVEAU! TELESKOPER ORBIT (Ø 125 mm)

1 ORBITE INTERCHANGEABLE POUR 4 DIAMÈTRES DE BLOCS AVEC
LA NOUVELLE LIGNE CONFORT DE FRAISEUSES M2.



REGARDEZ LA
VIDEO



WEAB2684FR=