

# Zirkonzahn<sup>®</sup>

*Human Zirconium Technology*



**ZIRCONIA PRETTAU**

## *Restauri con Zirconia Prettau*

I restauri Prettau possono essere anche modellati come ponti parzialmente anatomici, ciò significa che il nucleo che si stratificherebbe in dentina e già stato fresato in zirconia e opportunamente infiltrato con i liquidi coloranti specifici. Questa metodica ha il vantaggio che il dente è ricoperto solo da uno strato sottile di smalto, così si aumenta la stabilità complessiva della struttura, si risparmia tempo e si riduce la frattura (chipping) della ceramica quasi completamente.

La struttura grezza viene infiltrata individualmente tramite pennello con il Color Liquid Prettau e poi sinterizzata. Il lavoro sinterizzato viene poi stratificato solamente con degli smalti con un spessore di ca. 0,3-0,5 mm. Importante è ricoprire con lo smalto tutta la struttura in modo che l'effetto estetico ottenibile abbia una percettibile profondità del colore. Grazie all'eccezionale trasparenza della zirconia Prettau si possono conseguire restauri protesici con risultati pari a quelli stratificati con dentina, smalto, ecc.



## *Zirconia Prettau*

Aldo Zilio, Italia



*Struttura al 100% in Zirconia Prettau*



# Zirkonzahn®



## HUMAN ZIRCONIUM TECHNOLOGY

ZIRKONZAHN World Wide - Tel +39 0474 066 680 - [info@zirkonzahn.com](mailto:info@zirkonzahn.com) - [www.zirkonzahn.com](http://www.zirkonzahn.com)



*fresato con il sistema Zirkonzahn*