


Zirkonzahn®

Human Zirconium Technology

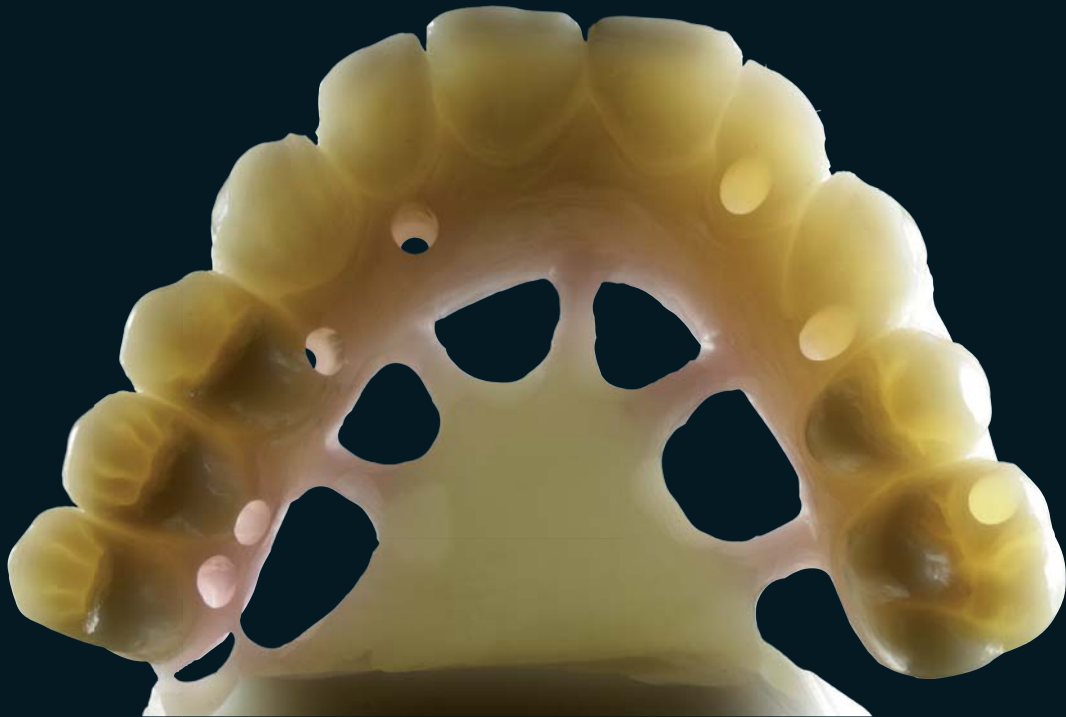

100% ZIRCONIA PRETTAU

Prettau Ziconia - 2 Ponti in zirconia integrale

Nei lavori di zirconia Prettau, la tecnica d'infiltrazione del colore è determinante per un effetto cromatico tridimensionale e un risultato naturale. In questo caso, illustrato, è stata infiltrata dapprima la zona dentale e successivamente la zona gengivale. Nella zona anteriore i denti sono stati colorati con il liquido infiltrante Prettau intensive: "Incisal grey", "Incisal violet" e il "Colour Liquid Fluoreszenz". Prima della stratificazione della ceramica sulla struttura è stato applicato un sottile strato di dentina. Per lo strato gengivale, si dovrebbe utilizzare, per avere un effetto più naturale, una gamma di colori quanto più ampia possibile. I denti anteriori sono stati stratificati solamente a livello labiale con un sottile strato di smalto. Importante è stratificare nello stesso tempo, senza cotture alternate, la zona gengivale e quella labiale. Infine, una lucidatura a mano dona, al lavoro completato, la superficie naturale.



Il Prettau Bridge

Jürgen Auffarth, Austria

In collaborazione con ZTM Christian Hannker, laboratorio odontotecnico Bellmann & Hannker (Germania)



Zirkonzahn®



HUMAN ZIRCONIUM TECHNOLOGY

ZIRKONZAHN World Wide - Tel +39 0474 066 680 - info@zirkonzahn.com - www.zirkonzahn.com



Fresare senza limiti



WEAA5815=