


# Zirkonzahn<sup>®</sup>

I.P.

*Human Zirconium Technology*

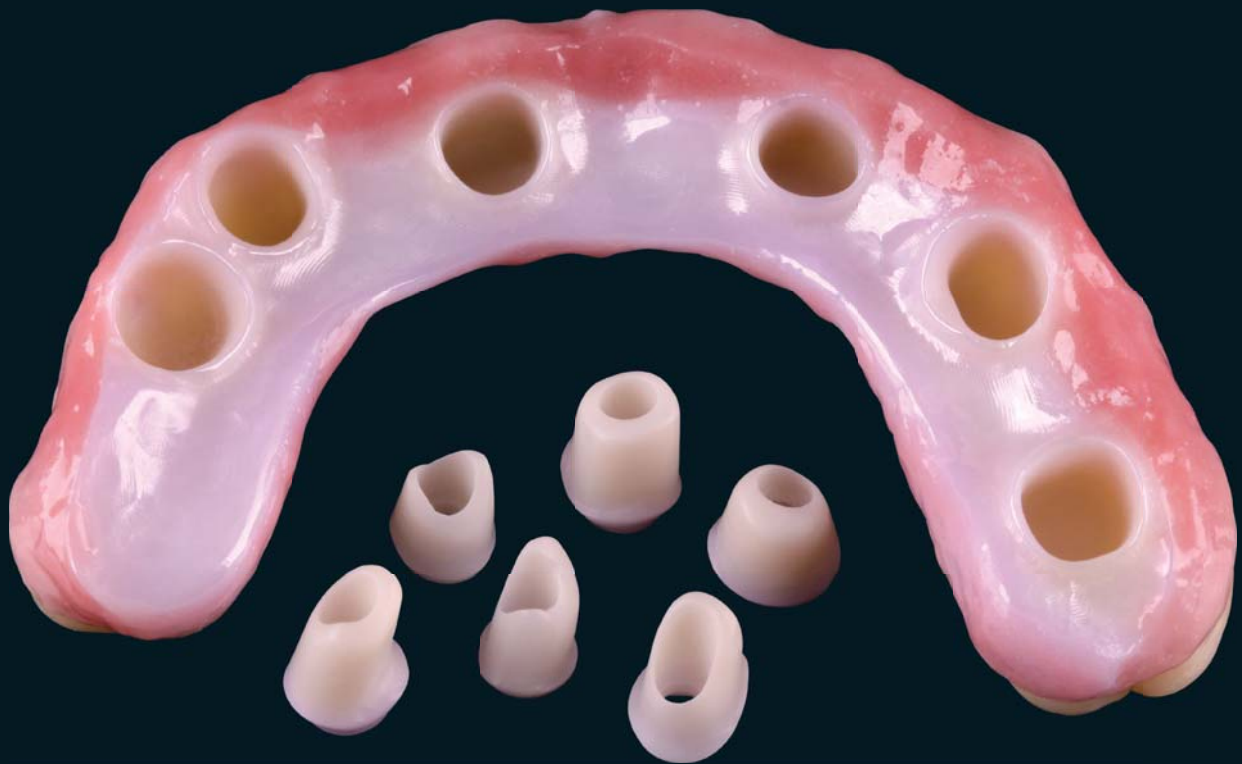

**100% ZIRCONIA PRETTAU - MADE BY CAD/CAM**

*„Zirconia necessita eroi“ Enrico Steger*

## *Zirconia Prettau*

In seguito ad un accordo tra dentista, paziente e odontotecnico sulla terapia da seguire, è stato pianificato un ponte da 10 elementi di Zirconia Prettau su 6 impianti dentali. Per realizzarlo si è impiegato il sistema CAD/CAM 5-TEC a cinque assi nel modo seguente:

il lavoro è stato, prima realizzato sul modello senza abutment con classici denti protesici e poi con la tecnica di doppia scansione è stata approntata una prima costruzione in resina. Durante la prova questa costruzione è stata controllata nei particolari per quanto riguarda l'adattamento e l'occlusione. All'occorrenza può essere rifinita individualmente per utilizzarla in seguito come base di lavoro. Infine è stata eseguita la tecnica di doppia scansione. Prima di tutto sono stati scansionati i monconi con un primo processo di scansione, poi, applicata la protesi in resina, è stata rilevata attraverso un ulteriore processo di scansione. In seguito, entrambe le scansioni sono state sovrapposte automaticamente dal software e il lavoro finito è stato generato virtualmente. Infine, questo modello realizzato in modo virtuale è stato fresato in Zirconia Prettau con la fresatrice a cinque assi CAD/CAM M5.



## *Il Prettau Bridge*

Zirkonzahn Education Center

Dr. Fernando Rojas-Vizcaya, Spagna



# Zirkonzahn®



*Fresato con il Zirkonzahn sistema CAD/CAM 5-TEC*

## HUMAN ZIRCONIUM TECHNOLOGY

*ZIRKONZAHN Worldwide - Tel +39 0474 066 680 - info@zirkonzahn.com - www.zirkonzahn.com*



WEAAS821

*Tutti i dati sono soggetti a modifiche. Salvo errori ed omissioni. Versione: 15.07.2013*