

Zirkonzahn®

Human Zirconium Technology



PRETTAU® 2 DISPERSIVE® BLEACH

La Cultura Zirkonzahn



RESTAURO INFERIORE E SUPERIORE IN ZIRCONIA PRETTAU® 2 DISPERSIVE® BLEACH

SU BASI IN TITANIO ANODIZZATE, CON STRATIFICAZIONE SOLO NELLE ZONE GENGIVALI CON FRESCO CERAMICS

I due restauri monolitici sono stati pianificati sulla base della scansione di due modelli fresati con gengiva rimovibile. Il primo montaggio virtuale è stato realizzato nel software Zirkonzahn.Modifier tramite l'individualizzazione di uno dei set di anatomie naturali disponibili nella libreria dentale Heroes Collection. Grazie alle marcature virtuali che contraddistinguono i denti della Heroes Collection, la gengiva è stata generata automaticamente.

Dopo aver eseguito il nesting delle strutture in un blocco di zirconia Prettau® 2 Dispersive® della tonalità Bleach 0M1, i due restauri sono stati fabbricati nella fresatrice M2 Dual Teleskoper. Questa zirconia si contraddistingue per l'ottima traslucenza e per l'elevata resistenza alla flessione ed è già dotata di sfumature di colore naturali. Tuttavia, per un risultato ancora più individuale, il colore è stato accentuato con l'applicazione dei liquidi di colorazione intensivi Colour Liquid Prettau® Aquarell. Dopo la sinterizzazione, l'area gengivale è stata rivestita con le paste ceramiche Fresco Gingiva.

Infine, prima dell'incollaggio alle strutture in zirconia, le basi in titanio sono state anodizzate in color oro con il Titanium spectral-colouring Anodizer: la tonalità dorata riduce infatti il valore di grigio conferito dalle basi in titanio, mettendo in risalto la brillantezza della zirconia.

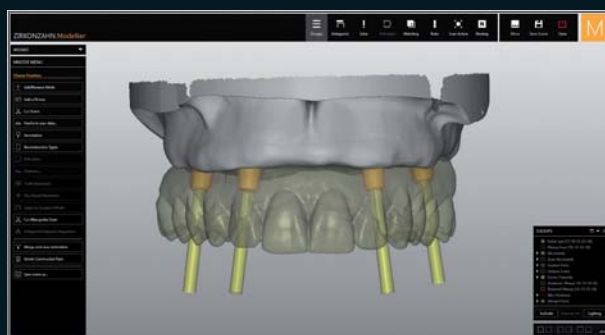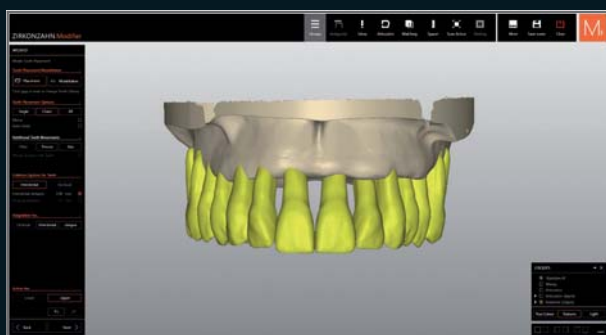

100 % DESIGN MONOLITICO, STRATIFICAZIONE SOLO NELLA ZONA GENGIVALE

Odt. Janka Gregorics – Zirkonzahn Education Center Brunico, Alto Adige, Italia





PRETTAU® 2 DISPERSIVE®

- Zirconia policromatica dalla traslucenza molto elevata, con sfumature naturali di colore e un'eccellente resistenza alla flessione
- Senza limiti! Particolarmente adatta per circolari monolitici ma anche per corone singole, inlay, onlay, faccette, barre e ponti a più elementi (ridotti o monolitici)
- Nessuna scheggiatura della ceramica (grazie al design monolitico), né abrasione dell'antagonista
- Caratterizzazione individuale del restauro con Colour Liquid Prettau® 2 Aquarell Intensivi, ICE Ceramics, Fresco Ceramics e ICE Stains 3D by Enrico Steger
- Disponibile anche in tre tonalità Bleach



Prettau® 2 Dispersive® Bleach 0M1

Tonalità Bleach



HUMAN ZIRCONIUM TECHNOLOGY

Zirkonzahn Worldwide – Tel +39 0474 066 680 – info@zirkonzahn.com – www.zirkonzahn.com

NOVITÀ! TELESKOPER ORBIT (Ø 125 mm)

4 DIAMETRI DIVERSI IN UN'UNICA ORBITA INTERSCAMBIABILE CON LA GAMMA DI FRESATRICI COMFORT M2



GUARDA IL
VIDEO



WEAB2684IT=