

Zirkonzahn[®]

Human Zirconium Technology



PRETTAU[®] ANTERIOR[®]




RIABILITAZIONE COMPLETA DI ENTRAMBE LE ARCADE IN PRETTAU® ANTERIOR®

Nel caso clinico considerato il paziente presentava superfici occlusali fortemente abrase in tutti gli elementi di entrambe le arcate e assenza dei denti 16 e 46. Dal momento che gengiva e sostanza naturale dei denti apparivano ancora perfettamente intatte, abbiamo optato per una riabilitazione costituita da corone individuali e da due ponti da tre elementi per l'integrazione dei due denti mancanti.

La scelta del materiale giusto per questo caso clinico non è stata difficile: la decisione è caduta su Prettau® Anterior® che, con una resistenza alla flessione di 670 MPa, risultava ideale per sopportare le elevate sollecitazioni masticatorie del paziente.

A partire dal profilo anatomico completo, il settore anteriore dei mascellari superiore e inferiore è stato ridotto solo leggermente, quanto bastava per consentire l'applicazione di un rivestimento molto sottile sul lato labiale. In questa procedura è importante conservare il profilo anatomico completo dei bordi incisali nel settore funzionale in modo da creare una sorta di "bordo protettivo". In questo modo è possibile evitare quasi completamente la scheggiatura della ceramica.

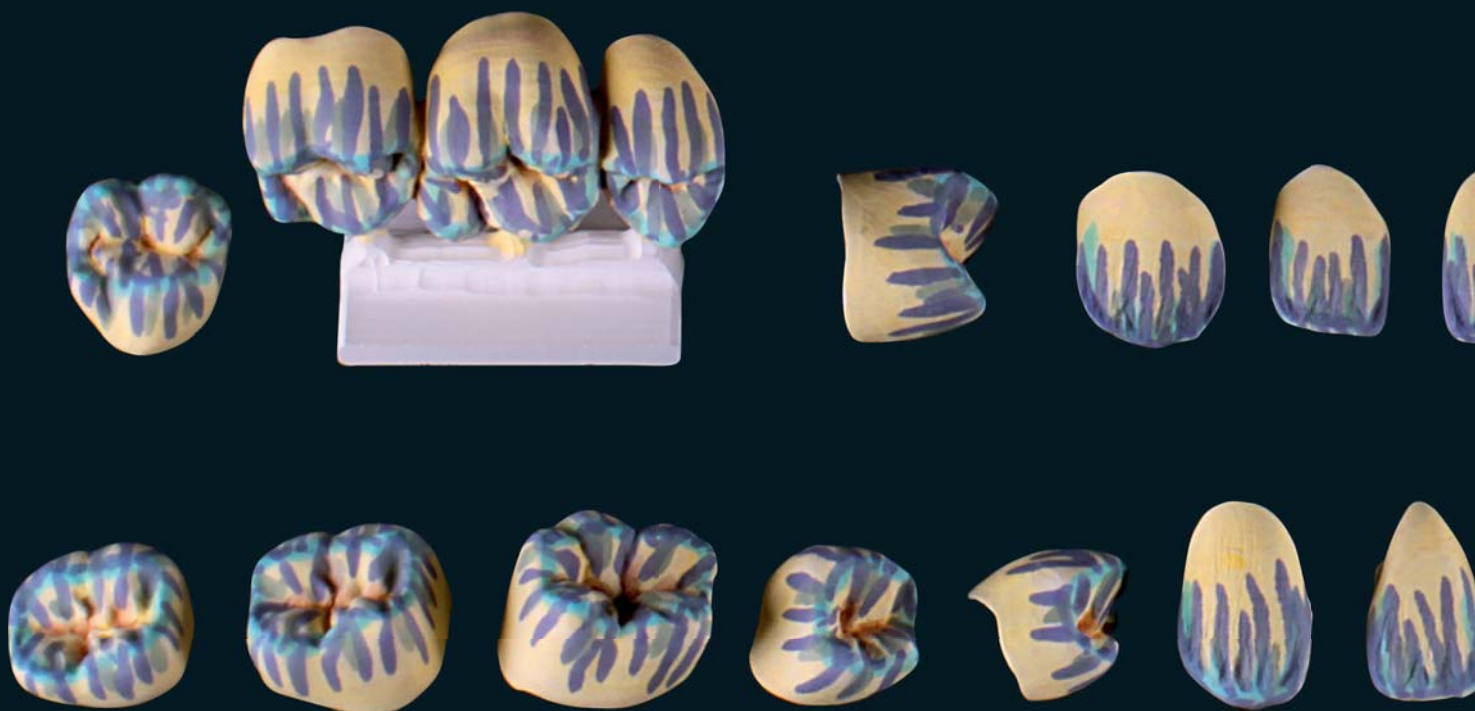

Le strutture sono state colorate con Colour Liquid Prettau® Anterior® Aquarell.

Zirkonzahn®

DATE DELLE
CONFERENZE DI
**ENRICO
STEGE**

WWW.ZIRKONZAHN.COM



Sia il settore funzionale che quello estetico sono stati realizzati in Prettau® Anterior®.

HUMAN ZIRCONIUM TECHNOLOGY

ZIRKONZAHN Worldwide – Tel +39 0474 066 680 – info@zirkonzahn.com – www.zirkonzahn.com



Risultato finale della riabilitazione delle due arcate in Prettau® Anterior®.



WEAA5871=

Tutti i dati sono soggetti a modifiche. Salvo errori ed omissioni. Versione: 04/11/2015