

Zirkonzahn[®]

Human Zirconium Technology



100 % ZIRCONIA PRETTAU[®] - MADE BY CAD/CAM


“Com perseverança até á perfeição” Enrico Steger

Solução híbrida sobre implantes divergentes – Ponte aparafusada em Zirconia Prettau®

O caso aqui descrito apresenta uma diminuição da dimensão vertical e implantes divergentes no sector anterior. A divergência limita a realização de uma prótese aparafusada.

A restauração foi realizada em zirconia e escolheu-se a Zirconia Prettau® e uma solução mista: no sector posterior a ponte é aparafusada, e no sector anterior apoiada sobre os implantes (pilares).

Optou-se pela Zirconia Prettau® porque não necessita ser ceramizada. Foi inicialmente realizado um encerramento com montagem de dentes que foi provado em boca para avaliação funcional e estética. A partir dessa montagem realizámos uma provisória de longa duração que fica em boca. Com a consequente aprovação por parte do paciente e funcionalmente confirmada a provisória é duplicada em zirconia. O trabalho definitivo é caracterizado internamente com líquidos especiais e sinterizado. A zona gengival é caracterizada com cerâmica tissue, concluindo-se a caracterização e o glaze.

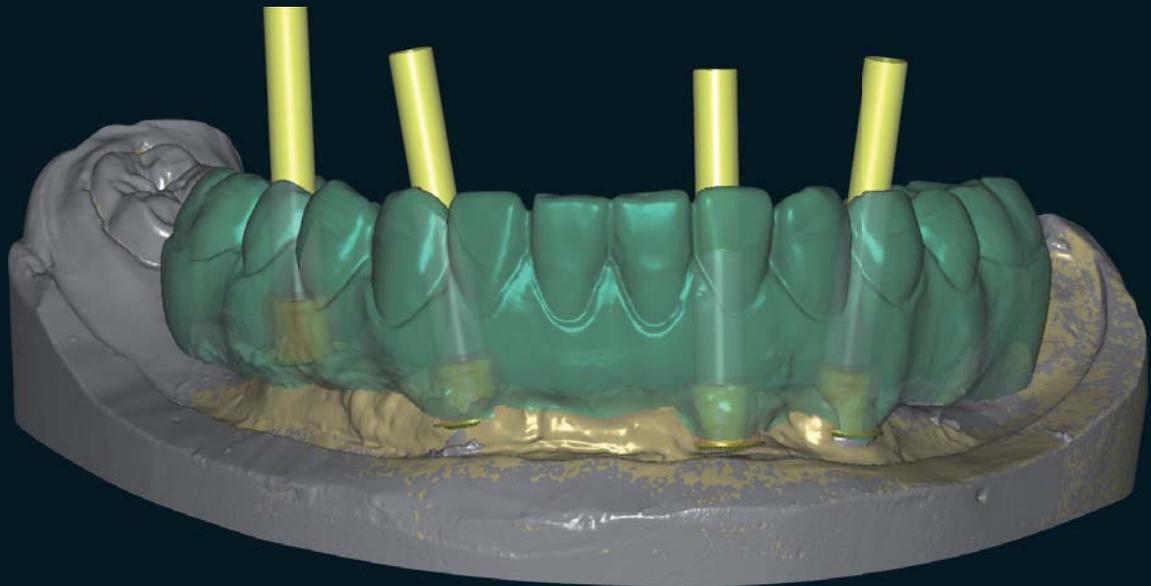

A Prettau® Bridge

Dr. Bátorfi Béla, Bátorfi Fogászat – DentAvantgArt, Hungria

Georg Walcher – Zirkonzahn Education Center



Zirkonzahn®



Fresado com o sistema CAD/CAM 5-TEC da Zirkonzahn

HUMAN ZIRCONIUM TECHNOLOGY

ZIRKONZAHN Portugal - Luis Macieira - Tel +351 217 58 62 69 - zirkonzahnportugal@clix.pt

ZIRKONZAHN Worldwide - Tel +39 0474 066 680 - info@zirkonzahn.com - www.zirkonzahn.com



WEAA5934=

Informações sujeitas a alterações. Versão: 24.04.2012